

ASSIETTE ISOTHERME

Référence	Désignation
CE02ASI01	Assiette isotherme



Atouts :

- Permet la conservation des aliments au chaud.

Indications:

Pour personne :

- Mangeant lentement.
- Ne pouvant manger que d'une seule main.
- À mobilité réduite.

Mode d'emploi :

- Ouvrir le bouchon et remplir le compartiment d'eau chaude non bouillante.
- Bien refermer le bouchon.
- Déposer les aliments dans l'assiette.

Description :

- Diamètre assiette : 21,5 cm, hauteur 5 cm
- Diamètre hors tout : 26,5 cm, hauteur totale : 9,5 cm
- Poids net : 360 g
- Capacité réservoir d'eau 80 cl
- Passe au micro-ondes sauf la base antiglisse et le bouchon.

Composition :

- Base, assiette et couvercle : Polypropylène
- Bouchon élastomère
- Partie antiglisse : silicone

Entretien :


- Passe au lave-vaisselle.

Précautions d'emploi :

- Avant la première utilisation, laver l'assiette.
- Ne pas laisser les utilisateurs agités sans surveillance.
- L'eau chaude et la vapeur d'eau peuvent provoquer de graves brûlures, faire preuve d'une extrême prudence lors du remplissage du réservoir.
- Tenir éloigné d'une source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 23 x 23 x 9,5 cm.
- Poids brut : 450 g.

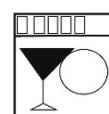

(sauf base antiglisse et bouchon) 1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45