

Kit de nébulisation avec masque adulte NEBULISEUR MICRONEB III


KIT DE NEBULISATION pour la délivrance d'un traitement à visée broncho-pulmonaire
Transforme une solution ou une suspension en un brouillard de fines gouttelettes (aérosol)

UTILISATION :

- 1) Lavez-vous les mains.
- 2) Versez le médicament dans la cuve du nébuliseur conformément à votre prescription.
- 3) Reliez le nébuliseur au compresseur avec le tuyau.
- 4) Adaptez le masque sur le nébuliseur.
- 5) Mettez en marche le compresseur et respirez l'aérosol par la bouche.
- 6) Arrêtez le traitement lorsqu' aucun brouillard ne sort plus du masque (un peu de médicament peut rester dans le nébuliseur, c'est le volume résiduel)

Caractéristiques techniques (norme NF EN 13544-1) avec compresseur Econoneb :

Débit d'Aérosol produit à 7L/Min : 0.092 ml/min .
Aérosol produit : 0.56 ml
MMAD : 3,2 μm .
(pour 2.5 ml dans le nébuliseur)
Pression d'utilisation : 106.9 Kpa
Niveau sonore : 66 dbA
Volume de remplissage : 2-10 ml . (mini-maxi)

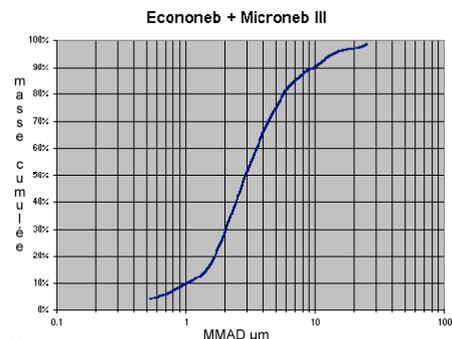

NETTOYAGE : doit être nettoyé après chaque utilisation.

1. Immédiatement après usage, démonter le nébuliseur et jeter le médicament restant.
2. Nettoyer les éléments du nébuliseur dans de l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle.
3. Rincer soigneusement et laisser sécher complètement avant de remonter le nébuliseur.
4. Faire fonctionner à vide quelques secondes , et stocker dans un endroit propre et sec, recouvert d'un linge propre.