

bionette

Solution électronique révolutionnaire pour traiter les symptômes associés à la rhinite allergique (rhume des foins) : pharynx irritant, démangeaisons oculaires, démangeaisons dans les oreilles, démangeaisons nasales, nez qui coule, larmoiements, éternuements, maux de tête...

BLBIONETTE BIONETTE - SOLUTION DE LUTTE CONTRE LES SYMPTOMES ALLERGIQUES



Bionette est une solution électronique innovante et **brevetée** qui **soulage et prévient les symptômes allergiques liés au rhume des foins en quelques minutes**, grâce à la **photothérapie** (traitement à l'énergie lumineuse), **sans prise de médicaments et sans effets secondaires**.

Compact et livré avec son étui de transport, Bionette se transporte très facilement.

Le traitement n'est ni chimique ni pharmacologique. Le dispositif Bionette utilise la technologie de lumière à bande étroite de bas niveau. Efficacité prouvée cliniquement (études fournies sur demande).

Utilisation

Simple et rapide : une fois allumé, insérer les 2 broches dans le nez.

Le dispositif s'éteint automatiquement à la fin de la séance (environ 4 min). L'efficacité peut augmenter avec l'utilisation répétée.

Caractéristiques techniques

- . 2 boutons / OFF automatique
- . Durée séance de traitement : environ 4'30 minutes (minuteur intégré) ± 15%
- . Fréquence d'utilisation recommandée : 2-3fois/jour
- . Longueur d'onde lumière : 630nm
- . Puissance de luminosité : minimum 4,0mW pour chaque narine
- . Dose énergétique : 2J
- . Condition de stockage : T° de -10°C à 40°C
- . Humidité < 80% / P° atmosphérique de 86kPa à 106kPa / absence de gaz corrosif / pièce ventilée et sèche
- . Transport : éviter la pluie et l'ensoleillement trop important
- . Conditions d'utilisation : T° de 5°C à 40°C / Humidité de 15% à 93%
- . Fonctionne avec 2 piles CR2032 (3V) (fournies)
- . Durée de vie des piles : environ 80 séances / Indication de piles faibles : clignotement de la LED



Livré complet avec :

- . **1 étui de transport et protection rigide,**
- . **2 piles CR2032 en place dans le dispositif,**
- . **2 piles CR2032 de recharge,**
- . **1 mode d'emploi** (anglais, français)

- . Garantie 2 ans
- . Fabriqué par Biolight

- . Poids net : 18 grs avec piles – Poids brut : 60 grs
- . Dimensions appareil : 52*38*15mm

Précautions d'emploi :

- . Surveillance parentale requise pour les enfants
- . Ne pas regarder directement la source de lumière
- . Tenir hors de la vue et de la portée des enfants
- . Lire le mode d'emploi avant utilisation

- . Code EAN : 798304316544
- . Code douanier :

Il n'y a pas d'effets secondaires connus lors de l'utilisation de l'appareil. Les personnes souffrant de rhinite allergique grave peuvent utiliser Bionette plus de trois fois par jour sans craindre d'effets secondaires indésirables.