




COUSSINS DE NOYAUX DE CERISES

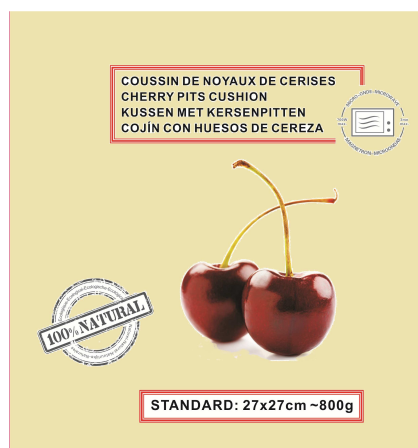

Le coussin Noyaux de Cerises ou bouillotte sèche est une vieille tradition Suisse qui met à profit les propriétés réfractaires des noyaux de cerise.

Ecologique et 100% naturel, l'enveloppe de coton permet un lavage complet (avec noyaux) à 30°.

Bien entretenu il peut être utilisé indéfiniment.

Le coussin libère après chauffage une odeur naturelle agréable de cerises.

Les noyaux de cerises épousent les formes du corps afin de diffuser la chaleur partout où celle-ci est nécessaire et conservent plus longtemps la chaleur qu'une bouillotte à eau.


Même refroidi sa température ne descendra jamais en dessous de la température corporelle, son contact ne sera donc jamais froid.

Utilisation en compresse chaude :

Faire chauffer le coussin au micro ondes à 700 Watts maxi durant 3 minutes maximum.

La douce chaleur émise par le coussin apaisera : Les tensions du cou et de la nuque, les douleurs cervicales, les douleurs lombaires, les douleurs scapulaires, les douleurs abdominales, les douleurs articulaires, les coliques du nourrisson, les douleurs rhumatismales ou liées à l'arthrose....

Il sera le produit idéal pour les enfants et les personnes âgées car dépourvu des dangers liés à l'eau bouillante. Il peut être utilisé avec profit pour des exercices de gymnastique des mains et/ou des pieds

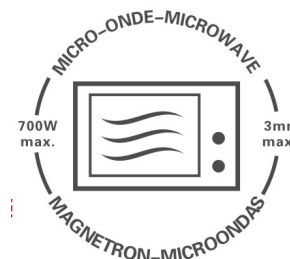


Utilisation en compresse froide :

Placer le coussin entre 30' et 3heures au congélateur selon la Température de celui et l'intensité de froid désiré. Le froid intense émis par le coussin apportera soulagement en cas de : Fièvres, Douleurs dentaires, Amygdales enflammées, Piqûres d'insectes, Migraines, Traumatismes sportifs

Disponible en 2 versions:

STANDARD : 27x27cm, 800 g
3 70044 550065 9

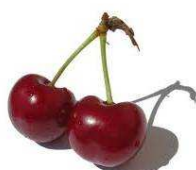

SPECIAL : 13x55cm, 1120 g
3 70044 550066 6

LBS MEDICAL

LBS 101 CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY SUR SEINE TEL: 01 30 15 06 96 FAX: 01 39 76 45 52

E-mail : labo.lbs@free.fr www.lbs-medical.com