



NOTICE

2111186030	TABLE PLIANTE BOIS NOTIA NOIR JOLETI
2111186060	TABLE PLIANTE BOIS NOTIA BLEU JOLETI



Félicitations pour l'achat de votre nouvelle table de massage portable. Votre nouvelle table a été habilement conçue selon des normes rigoureuses, utilisant une haute qualité de composants et matériaux.

Avec une utilisation et un soin approprié, comme indiqué dans ce manuel d'utilisation, votre table doit offrir des performances fiables et durables. Afin d'assurer l'utilisation sûre et correcte de votre table, veuillez prendre un moment pour lire l'intégralité de ce guide avant d'utiliser votre table.

INSTRUCTIONS DE PRÉCAUTION

1) Vérifier la table périodiquement. Assurez-vous que toutes les vis sont bien fixées et que le câble n'est pas détérioré ou effiloché. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures dans la structure en bois.

2, ne surchargez pas la table au-delà de la limite de poids recommandée. Ce pourrait entraîner des blessures graves pour l'utilisateur.

3, n'utilisez pas de nettoyeurs à base d'alcool pour nettoyer le vinyle. Cela pourrait endommager les matériaux en vinyle. Utilisez de l'eau chaude savonneuse et essuyez.

4, assurez-vous lorsque vous utilisez la table que les quatre pieds sont sur une surface solide et au même niveau.

CONFIGURATION DE LA TABLE

Placez la table sur le côté, relâchez les boucles, ouvrez partiellement la table et retirez les accessoires.

Figure 1

Debout derrière la table, saisissez les deux poignées de la table et balancer doucement dans un mouvement vers l'extérieur pour ouvrir complètement la table. Les jambes doivent s'ouvrir automatiquement.



Figure 1

Figure 2

Tournez la table à la verticale en soulevant le milieu de la table. Appuyez sur le milieu de la table pour s'assurer que la table est à plat. Si la table culmine dans le milieu, vérifiez et redressez le câble.



Figure 2

UTILISATION DE LA TABLE ET DES ACCESSOIRES

Nous fournissons des accessoires optionnels pour vous. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

Appui-tête:

L'appui-tête se compose d'une base d'appui-tête en croissant et Crescent Face Pad. Cela permet un soutien de la tête et du visage. Vous pouvez avoir une autre option pour la base de l'appui-tête. (Figure 3)



Figure 3

Insérez les bras tubulaires du berceau facial dans les trous de l'appui-tête et de la table et verrouillez la position à l'aide du levier de verrouillage de l'appui-tête. (Figure 4)



Figure 4

Modifiez l'angle et la hauteur de la base en ajustant la poignée de base. (Figure 5)



Figure 5

Fixez l'oreiller d'appui-tête à l'appui-tête avec le Fermeture velcro fournie. (Figure 6)

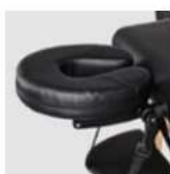


Figure 6

Tablette d'accoudoir réglable :

Cette étagère d'accoudoir réglable est un bon appareil pour soutenir les bras de votre client devant la table. Accrochez l'étagère de l'accoudoir aux deux barres de l'appui-tête et faites glisser la ceinture vers le haut ou vers le bas en positions optimales. (Figure 7)



Figure 7

Extension du bras latéral:

Les accoudoirs latéraux rembourrés amovibles ajoutent de la largeur à la table. Ils s'inscrivent dans le trous pour accessoires de chaque côté de la table. Cela donnera du confort en particulier aux personnes en surpoids.

Réglage de la hauteur:

La bonne hauteur de la table est déterminée par la hauteur du thérapeute,

Vous pouvez régler la hauteur en retirant le bouton de poignée de chaque pied. Remettez les boutons en place après avoir ajusté chaque pied à la position souhaitée.

Limites de poids de la table:

Positionner le client au centre de la table aidera à répartir le poids uniformément et assurer la stabilité.

Le poids de travail maximal pour la table est de 500 livres. Par exemple : pour un client pesant 300 livres, la pression descendante maximale qui peut être appliquée en toute sécurité est de 200 livres.

NE PAS DÉPASSER LE POIDS MAXIMUM DE TRAVAIL RÉFÉRÉ
(Ne dépassez jamais les limites de charge de la table; cela pourrait entraîner des blessures graves et / ou dommages.)

Espace de rangement:

Fixez la base de l'appui-tête et le coussinet facial sur l'élastique sous la table comme indiqué. Placez chaque accessoire dans sa position d'origine. (Figure 8)



Figure 8

ENTRETIEN

Entretien du rembourrage :

Nettoyage quotidien : Enlever la saleté de la table avec une solution d'eau chaude. Sécher avec un chiffon doux et non pelucheux.

Désinfection : désinfectez la table au besoin avec un produit à base d'isopropanol nettoyant désinfectant de qualité (approuvé pour une utilisation sur vinyle polyuréthane)

Détachage:

Certaines taches mineures peuvent être éliminées avec un nettoyant doux et non abrasif. Vaporiser sur un chiffon humide un nettoyant et essuyez doucement pour enlever la tâche.

Rincer abondamment avec de l'eau tiède et sécher avec un chiffon doux. Des taches plus tenaces peuvent nécessiter un nettoyage professionnel. Entretien du bois : Votre table de massage est faite de bois dur sélectionné avec finition laquée : cela ne nécessite aucun soin particulier. Si vous le souhaitez, vous pouvez polir de temps en temps avec un chiffon doux.