



NOTICE

1821137000	POIGNEE SORTIE DE LIT SUR PIED JOLETI
------------	---------------------------------------

1. L'épaisseur du matelas doit être supérieure à 10 cm pour assurer une stabilité suffisante du rail. Ne pas utiliser avec un matelas en mousse en raison de la légèreté de celui-ci.
2. Avant utilisation, veuillez vous assurer que chaque vis a été serrée dans le trou correspondant.
3. Veuillez vous assurer que le produit et le matelas sont horizontaux et verticaux lors de l'utilisation, sinon veuillez arrêter d'utiliser.
4. Les mains courantes ne peuvent être utilisées que comme produits auxiliaires. En cas de besoin particulier, veuillez contacter le personnel infirmier à temps.

joleti

