



DISPOSITIFS MÉDICAUX



**DENTASEPT®**

# Spray 41<sup>PRO</sup>

## INDICATIONS

Solution pour la désinfection rapide des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Utiliser Dentasept® Spray 41 PRO après chaque patient évite le risque d'infection croisée.

## AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Nouvelle formulation améliorée
- ✓ Solution prête à l'emploi
- ✓ Sèche rapidement et sans trace
- ✓ Temps de contact : 5 à 15 minutes (selon l'efficacité recherchée)
- ✓ Agréable parfum menthe
- ✓ Efficace en seulement 1 minute contre tous les virus enveloppés<sup>1</sup>
- ✓ Sans aldéhyde
- ✓ Dispositif médical de classe IIa (Directive 93/42/CEE modifiée)

<sup>1</sup> L'institut Robert Koch (RKI) recommande l'utilisation de désinfectants avec une activité virucide limitée pour interrompre la chaîne de l'infection. Selon le RKI, une activité virucide limitée (efficace sur les virus enveloppés) correspond à une activité sur Vaccinia virus et BVDV.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES À 20°C

Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 13697, NF T 72-281 - 5 minutes.  
SARM : EN 13727 - 5 minutes.  
Mycobactéricide : EN 14348, EN 13697 - 15 minutes.  
Levuricide : EN 1275, EN 13624, EN 13697, NF T 72-281 - 5 minutes.  
Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 13697 - 15 minutes.  
Actif sur PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Herpesvirus - 1 minute.

## COMPOSITION

Ethanol, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine, Chlorure de didécylidiméthylammonium, excipients.

## CONDITIONNEMENT

Flacon pulvérisateur d'1 litre.  
Bidon de 5 litres.



DISPOSITIFS MÉDICAUX

# DENTASEPT® Spray 41 PRO

## PROTOCOLE D'UTILISATION

Solution pour la désinfection rapide des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs. Utiliser Dentasept® Spray 41 PRO après chaque patient évite le risque d'infection croisée.

### AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

### COMMENT L'UTILISER

- 1 **ATTENTION** : avant utilisation, vérifier que la zone à traiter est compatible avec l'alcool et qu'elle a été nettoyée.
- 2 Pulvériser uniformément et en quantité suffisante sur la zone à traiter (+/- 30 ml/m<sup>2</sup> soit environ 10 pulvérisations).
- 3 Laisser Dentasept® Spray 41 PRO agir en s'assurant que la zone reste humide pendant le temps de contact recommandé. Appliquer une seconde fois si nécessaire.
- 4 Le rinçage est inutile sauf si le dispositif médical entre en contact avec la peau ou les muqueuses.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respecter les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIa CE0459.  
- Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conserver entre +5°C et +25°C.

