



PRODUIT DE RINÇAGE POUR INSTRUMENTATION

Anios RL

PRODUIT DE RINÇAGE POUR INSTRUMENTATION

- Activateur pour un séchage rapide et sans trace
- Haute compatibilité avec les polysulfones
- S'utilise avec tout type de machines



Anios RL

Produit de rinçage pour l'instrumentation



Anios RL
Bidon de 5 L



Anios RL
Bidon de 10 L

DONNEES PHYSICO-CIMIQUES

- Liquide limpide incolore
- pH du produit pur* à 20°C: environ 7,2
- pH du produit dilué à 0.08%*: environ 5,8
- pH du produit dilué à 0.3%*: environ 6,2
- Densité à 20°C: 1.013

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

INFORMATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT UNITAIRE	RÉFÉRENCE
Anios RL	2 bidons de 5 L	315.038
Anios RL	1 bidon de 10 L	315.024
Anios RL	1 bidon de 20 L	315.E425L
Anios RL	1 fût de 200 L	315.331



CE LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

INDICATIONS

Produit de rinçage neutre pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Produit combiné assurant un séchage rapide et sans marques.

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée. Utilisation aux dilutions de 0,08 à 0,3% en eau froide ou chaude (soit 0,8 à 3 ml par litre d'eau) selon le type de machine.

COMPOSITION

Association d'agents tensioactifs, agent antimoussant, agent stabilisant, excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur concernant la classification et l'étiquetage des produits chimiques).
Stockage: + 5°C à + 25°C.

CERTIFICATS

Disponibles sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.

 LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com