



DÉTERGENCE HAUTE PERFORMANCE POUR LE TRAITEMENT DE L'INSTRUMENTATION

Aniosyme DLM Maxi

DETERGENT TRI-ENZYMATIQUE ALCALIN DOUX POUR LE TRAITEMENT DE L'INSTRUMENTATION CHIRURGICALE

Aniosyme DLM MAXI est un détergent liquide alcalin doux pour un nettoyage optimal de l'instrumentation chirurgicale.

Conçu pour combiner une détergence intense avec une excellente compatibilité matériaux, Aniosyme DLM Maxi ne contient pas de silicate et peut être utilisé à de faibles taux de dilution.

- **PUISSANT** - Détergent haute performance pour tout type de matériel
- **ENZYMATIQUE** - Complexe tri-enzymatique : efficace sur tout type de salissures
- **EFFICACE** - Produit alcalin doux haute performance, efficace dès 5 minutes



Aniosyme DLM Maxi

Détergent tri-enzymatique alcalin doux pour le traitement de l'instrumentation chirurgicale



Aniosyme DLM Maxi
Bidon de 5 L

PUISSANT

Très haute compatibilité avec tout type de matériaux (inox, titane, synthétique, polysulfones, PVC/ABS, aluminium anodisé...).

ENZYMATIQUE

Complexe tri-enzymatique : efficace sur tout type de salissure pour un résultat remarquable.

EFFICACE

Produit alcalin doux haute performance.

DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Densité 20°C 1,21 g / ml
- pH* du produit concentré 20°C 10,3
- pH* du produit dilué (1 - 5 ml/l) 20°C 10,1 - 10,6
- Conductivité du produit dilué (1 - 5 ml/l en eau déminéralisée) 20°C 0,09 - 0,38 mS / cm

*pH mesurés en condition d'usage à l'aide d'un pH-mètre avec compensation de température.

INFORMATIONS

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Aniosyme DLM Maxi	2 bidons de 5 L	1920.038
Aniosyme DLM Maxi	1 bidon de 10 L	1920.024
Aniosyme DLM Maxi	1 bidon de 20 L	1920.271
Aniosyme DLM Maxi	1 fût de 200 L	1920.331
Aniosyme DLM Maxi	1 container de 1000 L	1920.004



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribué par :
LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

INDICATION

Détergent tri-enzymatique de l'instrumentation. Nettoyage du matériel chirurgical et médical, des dispositifs médicaux en laveur désinfecteur et tunnel de lavage.

MODE D'EMPLOI

- Solution concentrée pour usage professionnel.
- Utiliser à des taux de dilution entre 0,1 et 0,5%, de préférence en eau tiède ou chaude selon les types de machines.
- A la dilution d'emploi, le produit ne présente pas d'incompatibilité avec les matériaux communément rencontrés.

COMPOSITION

Tensioactifs non ionique et anionique, agents séquestrants, complexe enzymatique, excipients.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stocker entre +5°C et +25°C.

CERTIFICATS

Disponibles sur demande.

POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SECURITE DES DISPOSITIFS MEDICAUX

Merci de consulter l'étiquette et les informations du produit.



USAGE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS.

