

BANDELETTES DE CONTROLE DU TAUX D'ACIDE PERACETIQUE

Pour solution activée d'ANIOXY-TWIN Concentré

INDICATIONS

Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique dans la solution reconstituée d'ANIOXY-TWIN Concentré.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de l'activité du bain :
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 10 secondes après trempage.
Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 15 secondes après trempage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Les bandelettes sont stables :
- 30 mois si elles sont stockées entre 4 et 30°C.
- 90 jours après ouverture.


Conserver le flacon fermé, à l'abri de l'humidité, afin de garantir la durabilité des bandelettes.

INFO


La coloration jaune du bain d'ANIOXY-TWIN Concentré indique que le mélange Activateur/Générateur vient d'être effectué MAIS n'indique pas une présence ou non d'Acide peracétique dans la solution.

Seul le virage de la couleur de la bandelette est à prendre en compte.

Couleur Bleue intense à noire

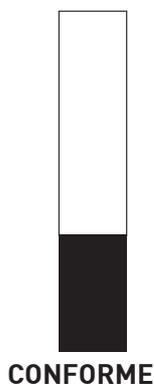

- Pas de couleur
- Evanescence rapide de la couleur
- Petits points
- Bordure colorée

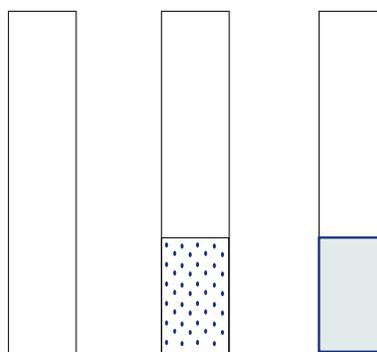

NON CONFORME

