



DISPOSITIFS MÉDICAUX



DENTASEPT®

SH^{PRO} Wipes

INDICATIONS

Lingettes prêtes à l'emploi imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante pour le traitement en milieu dentaire, des dispositifs médicaux invasifs tels que l'essuyage de l'instrumentation réutilisable (pièces à main rotatives, turbines, contre-angles...) en traitement préliminaire et son enveloppement pour éviter le séchage des souillures le temps de procéder aux étapes ultérieures, et des corps de la lampe à photo-polymériser (dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs).

AVANTAGES DU PRODUIT

- ✓ Formulé sans alcool, compatible avec tous les matériaux synthétiques, plastiques, etc
- ✓ Formulé sans parfum, sans colorant, sans substance allergène
- ✓ Lingettes en viscose - 100% biodégradable
- ✓ Dimensions : 180 x 200mm
- ✓ Dispositif médical de classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée)

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES À 20°C

Lingettes bactéricides et levuricides en 2 min, 20°C (EN 16615).

Solution d'imprégnation : Bactéricide en 1 min, 20°C (EN 13727).

Levuricide en 2 min, 20°C (EN 13624).

Active selon EN 14476 en 1 min, 20°C, sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus, Rotavirus, Herpesvirus, VRS.

Active selon EN 14476 en 5 min, 20°C, sur Coronavirus, et en 15 min, 20°C, sur Norovirus.

COMPOSITION

Solution d'imprégnation : Chlorure de didécyldiméthylammonium, excipients.

CONDITIONNEMENT

Sachet de 100 lingettes.



DISPOSITIFS MÉDICAUX

DENTASEPT[®] SH Wipes

PROTOCOLE D'UTILISATION

Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et désinfectante, prêtes à l'emploi, pour le traitement des dispositifs médicaux en milieu dentaire.

AVANT UTILISATION

Porter des gants appropriés.

COMMENT L'UTILISER

- 1 Retirer la lingette du sachet.
- 2 Appliquer sur l'ensemble de la zone du dispositif médical à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire.
- 3 Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.
- 4 Le rinçage est inutile sauf si le dispositif médical entre en contact avec la peau ou les muqueuses.

Bien refermer l'emballage après chaque ouverture. Ne pas réutiliser la lingette. La désinfection ne pourrait plus être garantie. Dossier scientifique (efficacité, compatibilité...) disponible sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Avant tout utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée). Usage réservé aux professionnels.
Conserver entre +5°C et +35°C.

