

MISE EN PLACE DU FILTRE

!
PURGER
LE FLEXIBLE
DE DOUCHE
!

Ne jamais poser
la douchette en
dehors de son
support.

Éviter de poser la
main sur la jupe
de protection du
filtre.

Ne pas nettoyer
le filtre.

Ne pas ôter le filtre
avant la période
des 31 jours.

Changer impérativement
le filtre au 31^{ème} jour
d'utilisation.



1 Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette repositionnable et la coller sur le cahier de traçabilité.



2 Ouvrir le sachet stérile.



3 Adapter le filtre sur le flexible.



4 Placer le filtre sur le support de souche, éliminer le sachet.



5 Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.



6 Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.



À la première utilisation, maintenir le filtre, tête de la douche en haut (cf photo) et ouvrir le robinet afin de chasser toutes les bulles d'air présentes.