

MISE EN PLACE DU FILTRE



Ne jamais poser la douchette en dehors de son support.

Éviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.

Ne pas nettoyer le filtre.

Ne pas ôter le filtre avant la période des 31 jours.

Changer impérativement le filtre au 31^{ème} jour d'utilisation.



Ouvrir le sachet.



Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette repositionnable et la coller sur le cahier de traçabilité.



Adapter le filtre sur le flexible.



Placer le filtre sur le support de douche, éliminer le sachet.



Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.



Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.



À la première utilisation, maintenir le filtre, tête de la douche en haut (cf photo) et ouvrir le robinet afin de chasser toutes les bulles d'air présentes.