



NOTICE D'INSTRUCTIONS



REF : COUV1-COUV2-COUV3-COUV4-COUV31 -COUV32-COUVXXL

Couverture bactériostatique

IMPORTANT

Lire attentivement la notice avant toute utilisation de ce produit et la conserver en cas de besoin.

Utilisateur : si vous êtes dans l'incapacité de lire ou de comprendre les avertissements, précautions ou instructions, veuillez contacter votre professionnel de santé ou distributeur avant d'utiliser ce produit sous peine de risques et de dommages.

Consulter un médecin avant d'utiliser un dispositif médical. Il vous conseillera et vous informera sur l'utilisation la plus appropriée de ce produit.

Distributeur : cette notice doit être remise aux utilisateurs de ce produit.

SYMBOLE FIGURANT SUR L'ETIQUETTE OU DANS LA NOTICE D'UTILISATION

	SARL GetC Clinibed 1 – Rue Leuridan-Noclain F 59150 WATTRELOS		Invitation à consulter le manuel d'utilisation
	Date de fabrication Lire étiquette sur le produit		Respecter les consignes de sécurité
	Numéro de lot Lire étiquette sur le produit		Conformité CE
	Référence du produit COUV1 - 110X190 - SOUDÉE COUV2 - 140X200 - SOUDÉE COUV3 - 110X190 - COUSUE COUV4 - 140X200 - COUSUE COUV31 - 110X190 - AVEC ZIP COUV32 - 110X190 - AVEC LACETTE COUVXXL - 120X200 - COUSUE		Craint l'humidité

DESTINATION DU PRODUIT

La couverture bactériostatique est un dispositif médical non invasif de classe 1 de règle 1 selon le Règlement UE 2017/745. La couverture bactériostatique prévient du risque d'hypothermie du patient allongé. Elle est imperméable et respirante. Elle est utilisée dans le lit médical ou sur le brancard. Elle est utilisée dans l'univers du bloc opératoire et des urgences. Elle convient aux patients pendant les transports (brancards, ambulances) et les zones d'attentes des établissements de soins. (Coulloirs, salles de réveil). Elle est utilisée dans le circuit de la prise en charge du patient en ambulatoire. Elle est posée sur le patient afin de maintenir la chaleur du corps. L'établissement pourra faire le choix d'une finition cousue ou soudée. La finition soudée est garante d'une meilleure hygiène mais le séchage en machine est plus long. Elle n'est pas à considérer comme une couverture chauffante pour le bloc opératoire. Elle est lavable et réutilisable. Elle se décontamine entre chaque patient ou se lave à 95°C suivant le service dans le lequel on se trouve et suivant le protocole d'entretien qu'on a défini.

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Le non-respect des précautions d'emploi peut entraîner des risques de contamination pour le patient et de blessures. A chaque utilisation vérifier que la décontamination du produit est bien faite et qu'elle est parfaitement hygiénique suivant le protocole d'entretien que vous avez défini avec le service Hygiène. Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits chlorés qui sont non nettoyantes et qui altère la matière. Ne pas coller de champs opératoires sur la couverture : la colle peut endommager la surface de la couverture.

Ne pas utiliser une couverture souillée. Ne pas utiliser une couverture mal séchée et encore humide. Respecter les conditions d'entretien et de séchage. Ne pas utiliser une couverture trop large, vous diminuerez ainsi le temps de décontamination de sa surface. Il est conseillé d'utiliser la largeur 140 cm pour le lit médical et la largeur 90 cm pour le brancard. Vérifier l'état des soudures et des coutures avant utilisation. Ne pas utiliser la couverture si le patient ne l'accepte pas. Ne pas couvrir la tête du patient, vous risquez de l'empêcher de respirer et de se ventiler. Ne pas utiliser de finition soudée si vous n'avez pas un sèche-linge performant. Portez attention à ne pas coincer les barrières du brancard avec la couverture vous risquez de l'endommager.

POSE

La couverture se pose sur le patient. On peut border le patient en créant un cocon rassurant pour le patient.

Prenez soin de ne pas couvrir la tête du patient pour ne pas l'empêcher de respirer et de se ventiler.

Option : REF COUV32BN : une lacette en polyuréthane permet d'attacher la couverture aux pieds du brancard.

UTILISATION - ENTRETIEN ET MAINTENANCE



L'absence d'entretien et de maintenance de votre produit peut entraîner des risques des risques de contamination et de blessures. Le service Hygiène de votre établissement aura testé l'entretien et aura élaboré son propre protocole en fonction de ses équipements.

- Décontaminer la couverture entre chaque patient avec un bactéricide non chloré. (Spray, lingette)
- Se référer aux conditions d'emploi et aux notices produits des produits décontaminants.
- Détacher au plus vite pour éviter toute migration de colorants dans la matière.

- Ne pas utiliser de produit abrasif, de détergent ou de produits chlorés qui sont non nettoyantes et qui altère la matière. L'utilisation du chlore peut entraîner un durcissement de la matière et à terme une délamination de la couverture - en cas de contact rincer à l'eau claire immédiatement
- Sécher avec un chiffon doux propre et sec après chaque décontamination.
- En cas d'usure ou de déchirure, ne pas tenter de réparer la couverture : la mettre au rebut ou contacter un revendeur agréé pour savoir si elle peut être prise en charge par le SAV CLINIBED.
- La couverture peut-être laver en lingerie industrielle par votre partenaire linge qui aura pris soin de lire la notice d'entretien et de lavage.

Conseils protocole lavage en machine :

- La couverture bactériostatique peut se laver en machine avec les détergents non chlorés de la collectivité.
- Trier le linge avec des gants à usage unique : souillé mouillé / souillé sec / contaminé
- Charger la machine
- Respecter les doses préconisées de lessive et de désinfectant
- Activer le programme lavage
- La température de lavage ne doit pas excéder 95°C (fusion à 110°C)
- Dans le cycle de lavage l'essorage à 1.000 tours / mn est essentiel, il permet d'évacuer l'eau à la surface de la couverture.
- Nettoyer et désinfecter les bacs de linge, les éviers, le sol.

Recommandations importantes :

- Pas de stérilisation - Pas d'assouplissants
- Pas de contact avec des produits teints dont les colorants pourraient migrer sur la couverture

Conseils Protocole séchage :

- Séchage possible à l'air libre sur un fil à linge.
- Séchage machine : Le séchage est une étape longue car la couverture doit éliminer l'eau de lavage résiduelle.
- Un test de séchage doit être fait avec le matériel dont on dispose ou avec votre partenaire fonction linge.
- Dans tous les cas il est recommandé de tester le séchage pour établir sa durée en fonction du matériel dont on dispose. Mettre au sèche-linge entre 60°C et 90°C pendant 45 minutes minimum. La chaleur du sèche-linge fait évaporer l'humidité à l'intérieur de la couverture.

IMPORTANT : Finition soudée : l'eau du lavage peut rentrer dans la couverture par des micro-fissures de l'assemblage. La transformation de vapeur d'eau en eau se crée à l'intérieur du produit. Seule la chaleur du sèche-linge permet d'éliminer l'eau de la couverture, il faut agir sur la température de séchage jusque 90°C et la durée du séchage.

A la sortie du sèche-linge défroisser et secouer la couverture. La stocker dans un endroit propre et tempéré.

CHANGEMENT DE LIT – DE PATIENT

Le produit peut être réutilisé. Il doit d'abord être nettoyé et désinfecté en respectant les consignes d'hygiène et de décontamination du service Hygiène. Lors du changement de patient, pensez à remettre la notice au nouvel utilisateur.

Au préalable, le produit devra être inspecté pour vérifier son bon état mais aussi son hygiène.

RECYCLAGE

Lorsque le produit sera devenu inutilisable et que vous devrez le jeter : veuillez contacter le service en charge de l'élimination de ce type de déchets. Si vous souhaitez effectuer le recyclage pour vous-même, demandez à la société locale de gestion des déchets de vous communiquer ses instructions.

STOCKAGE



Le non-respect des conditions de stockage peut entraîner une détérioration du produit et une altération du produit qui perdrait tout ou partie de son efficacité. Avant de le stocker vérifier qu'il est bien sec.

Le produit peut se stocker en 0 et 50 °C. Conserver à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.

Respecter les conditions pour ranger et stocker vos produits :

- Dans un endroit sec et tempéré. La couverture séchée doit être manipulée le moins possible pour éviter toute contamination inutile. Protéger votre produit par un emballage de la poussière et utiliser des gants.
- Ne pas y déposer de charges lourdes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assemblage : par pique pour la finition cousue. Par soudure au périmètre pour la finition soudée. Fil polyester - coton

Garnissage : Fibre 100% polyester

Enveloppe : 41% polyester – 59 % polyuréthane

Les REF COUV3 / COUV32BN / COUVXXL / COUV4 / COUV1 déclinées dans toutes les couleurs contiennent des biocides selon la norme EU 528/2012 -Protection contre la détérioration micro—biologique.

Ingrédients actifs : zinc-pyrithione + silver + 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate.

DUREE D'UTILISATION

La durée de vie prévue de ce produit est de 2 ans en conditions d'utilisation et d'entretien normales. Au-delà de cette période, le produit peut être utilisé aussi longtemps tant qu'il est toujours en bon état.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur (justificatif d'achat à fournir). CLINIBED assure le SAV pour tout défaut de couture ou de défauts de matériau. Contactez le distributeur chez qui vous avez acheté le produit au cas où vous auriez besoin de faire une réclamation. Toute réclamation SAV devra faire l'objet d'un retour du produit chez CLINIBED. Le retour se fera aux frais du demandeur. CLINIBED effectuera l'expertise et le diagnostic et l'enregistrement des anomalies dans le cadre du suivi qualité produit post-market selon le règlement UE 2017/745. CLINIBED réalisera la réparation ou le changement de produit s'il y a lieu. Les défaillances résultant de dommages accidentels, d'une mauvaise utilisation et d'entretien, de toute modification ne sont pas couvertes par cette garantie. CLINIBED ne prendra pas en charge le SAV d'un produit détérioré dans le cas d'une utilisation pour un patient inadapté. (Déchirure par les barrières du lit ou du brancard par exemple). Contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit pour appliquer la garantie.



SARL G&C CLINIBED -1, Rue leuridan-Noclain – F 59150 WATTRELOS
Cette notice est visible sur le site www.clinibed.com