



COMPRIMÉS NETTOYANTS

Formule ultra nettoyante et
non agressive au pH 9

L'hygiène quotidienne des prothèses dentaires est essentielle. Les comprimés nettoyants Fittydent® Professional sont LE complément indispensable de la gamme Fittydent® Professional. Seul son pH9 permet d'éliminer les résidus non solubles et garantit ainsi une durée de vie plus longue.

HALEINE FRAICHE


- > La puissante action nettoyante élimine rapidement tous les germes à l'origine de la mauvaise haleine et de la plaque dentaire.
- > L'**arôme mentholé** rafraîchit les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques.

SOURIRE ECLATANT

- > La formule à base de **bicarbonate de sodium** nettoie, prévient la formation de la plaque dentaire, favorise l'élimination du tartre et prévient le jaunissement.
- > Les Comprimés Nettoyants Fittydent® Professional favorisent également l'élimination des taches de goudron et de nicotine et **dissolvent les taches tenaces** en particulier dans les endroits difficiles d'accès.



Boîte de 32 comprimés

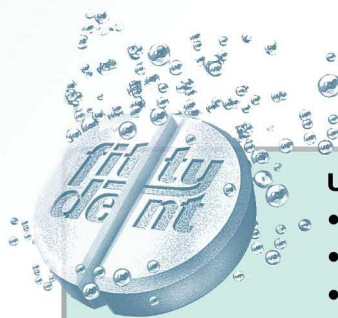

Un Comprimé – Trois Applications :

- Appareillage complet
- Appareillage partiel
- Appareillage orthodontique

Une utilisation simple et quotidienne



1. Retirez votre appareil et frottez-le sous l'eau avec une brosse à dents.
2. Mettez un comprimé nettoyant dans un verre d'eau tiède.
3. Plongez pendant 5 minutes votre appareil dans la solution effervescente.
4. Retirez et rincez ensuite votre appareil à l'eau courante.
5. Séchez-le complètement avant d'appliquer la Crème Fixative Fittydent® Professional.

PROTECTION

- > Les Comprimés Nettoyants Fittydent® Professional **contribuent à garder les gencives saines**.
- > Ils éliminent les particules d'aliments responsables de l'irritation des gencives.
- > Ils ne sont pas agressifs pour les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques. Ils n'entraînent pas la corrosion des éléments métalliques.

