

DÉCAPSULEUR MÉDICAMENTS

Référence	Désignation
SE03DEC02	Décapsuleur médicaments




Atouts :

- Permet de faire sortir, sans effort, les médicaments.

Mode d'emploi :

- Glisser la tablette entre le trou et la languette
- Presser sur cette dernière.
- Récupérer le médicament dans votre main ou un verre.

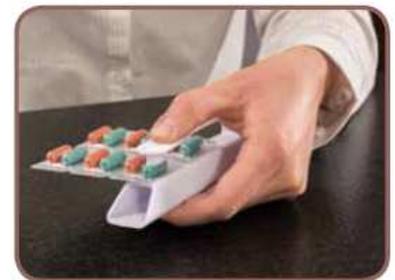

Description :

- Dimensions : 13 x 4,2 x 2,5 cm
- Poids net : 18g

Composition :

- ABS

Entretien :

- Nettoyage par essuyage.

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 6 x 15 x 5 cm.
- Poids brut : 35 g.



1935/2004/CE

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45