

A


Clean 44	52 cm	56,5 cm	98 cm	38,5* cm	44 cm	33 / 41 cm	22 cm	
Clean 49	52 cm	56,5 cm	103 cm	43,5* cm	49 cm	33 / 41 cm	22 cm	
Clean 55	52 cm	56,5 cm	107 cm	49,5* cm	55 cm	39 / 47,5 cm	22 cm	
Clean 60	52 cm	56,5 cm	112 cm	54,5* cm	60 cm	39 / 47,5 cm	22 cm	
Clean 24"	69 cm	74 cm	107 cm	49,5* cm	55 cm	39 / 47,5 cm	22 cm	
Clean HRB	54 cm	56,5 cm	102 / 114,5 cm	42 / 54,5* cm	47,5 / 60 cm	30 / 44 cm	22 cm	
Clean 44	7,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	13,5 kg	130 kg	
Clean 49	12,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	14,0 kg	130 kg	
Clean 55	12,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	14,5 kg	130 kg	
Clean 60	12,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	15,0 kg	130 kg	
Clean 24"	12,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	20,0 kg	130 kg	
Clean HRB	12,5 cm	36 cm	44 cm	48 cm	43,5 cm	14,2 kg	130 kg	

| **SV** *Med Gejder -1,5 cm | **NO** *Med bekkenholder -1,5 cm | **DA** *Med skinner - 1,5 cm | **EN** *With pan holders -1.5 cm
 | **DE** *Mit Beckenhalterung - 1,5 cm | **FI** *Ohjaimien kanssa - 1,5 cm | **FR** *Avec glissières pour bassin - 1,5 cm
 | **NL** *Met toilettemmerhouders -1,5 cm | **IT** *Con guide per padella -1,5 cm | **ES** *Con guías para cuña - 1,5 cm
 | **PT** *Com suportes de arrastadeira -1,5 cm


B

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6


C

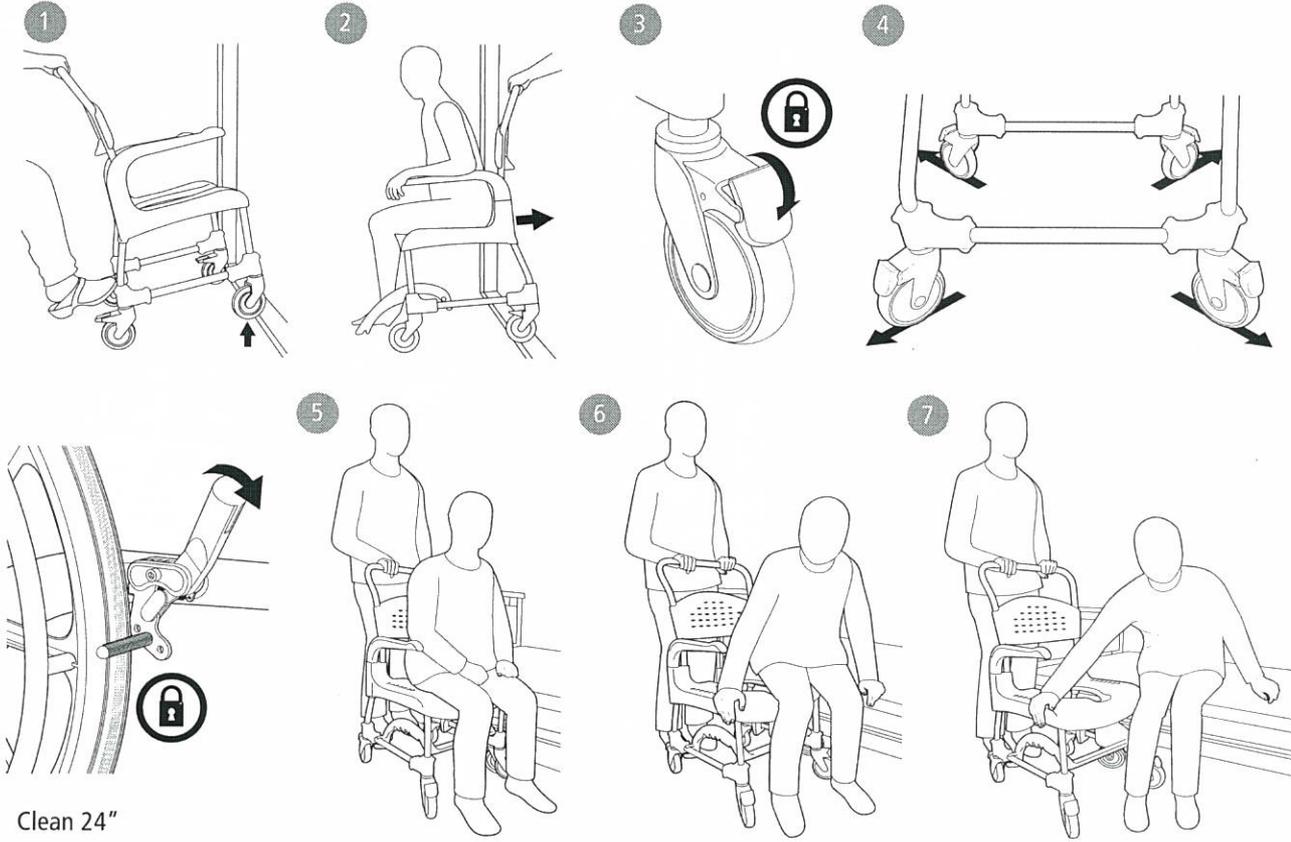


D

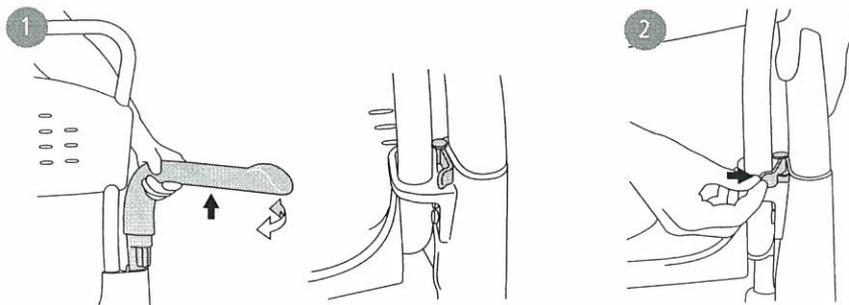


E

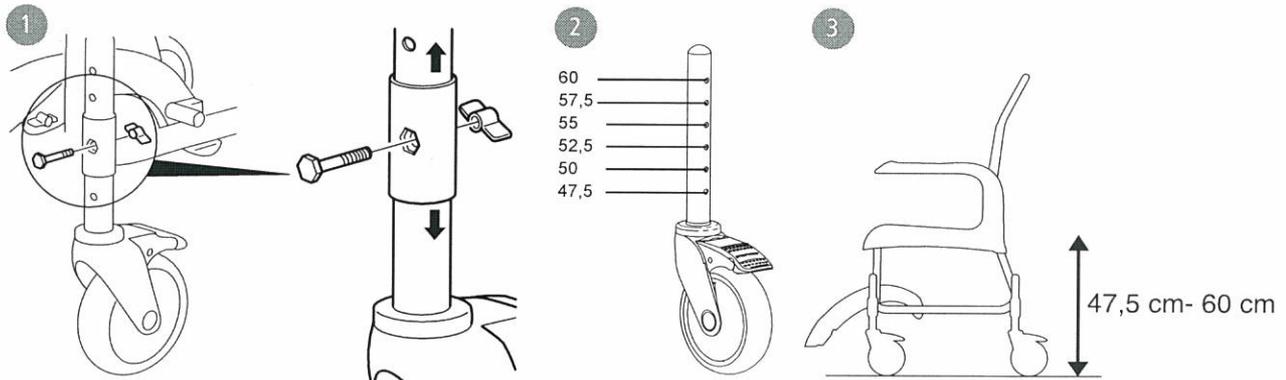


F

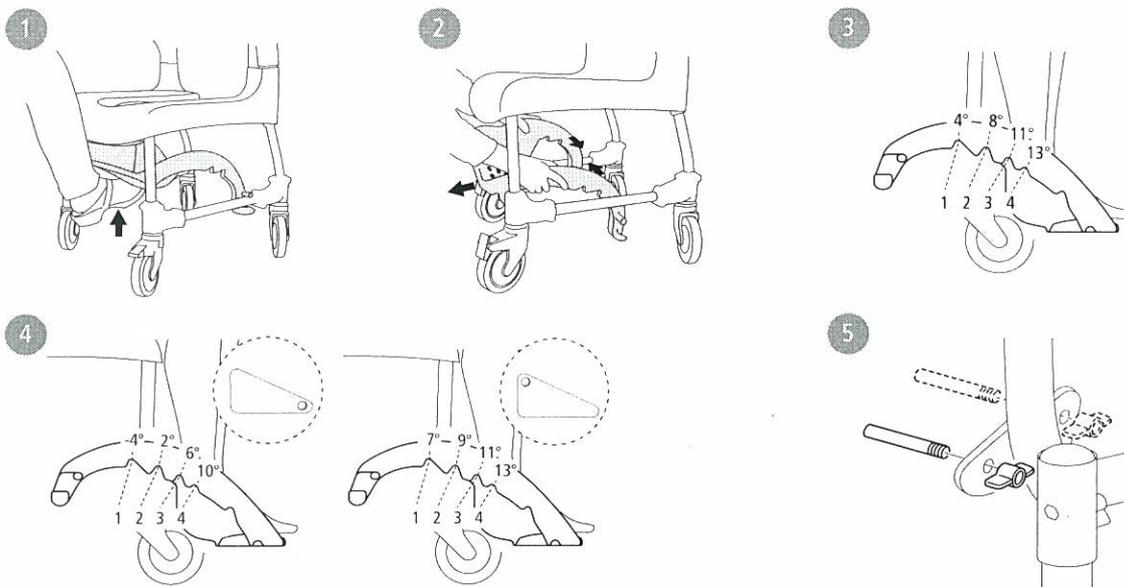


G

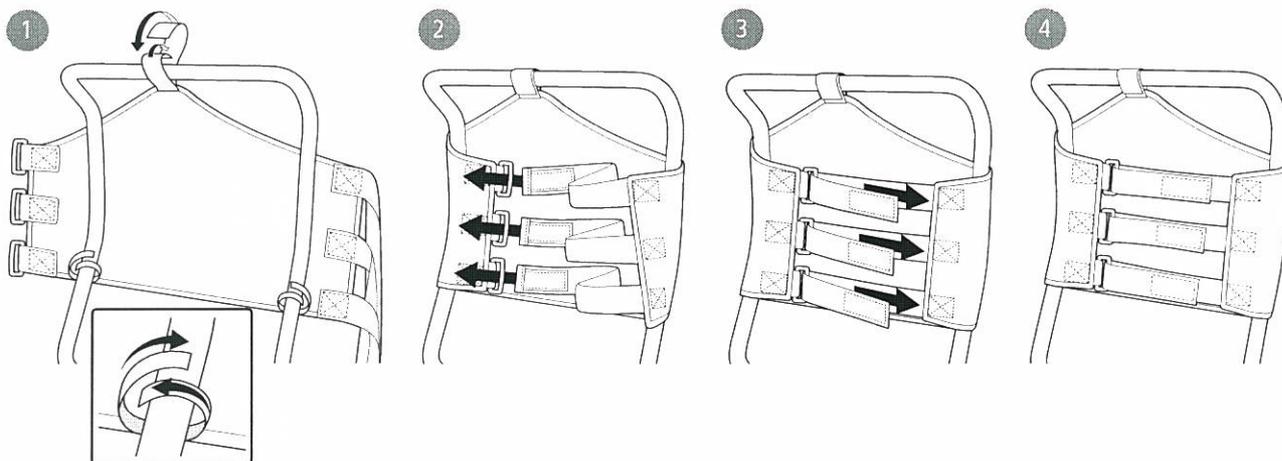

H

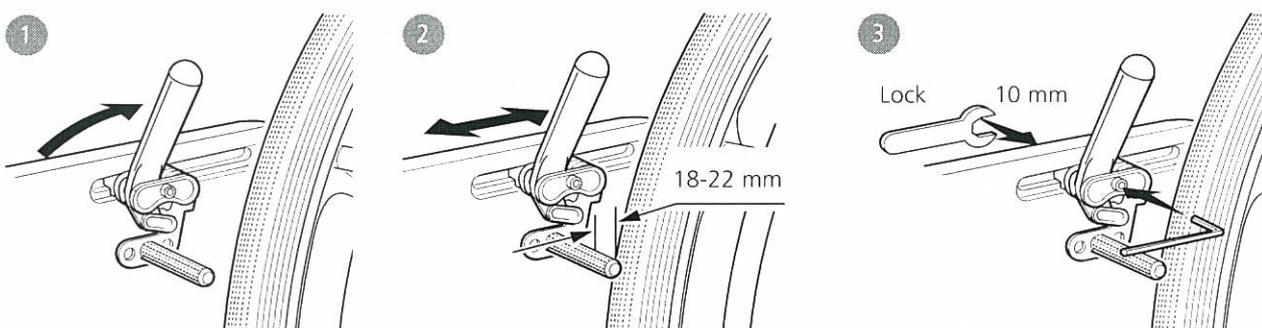

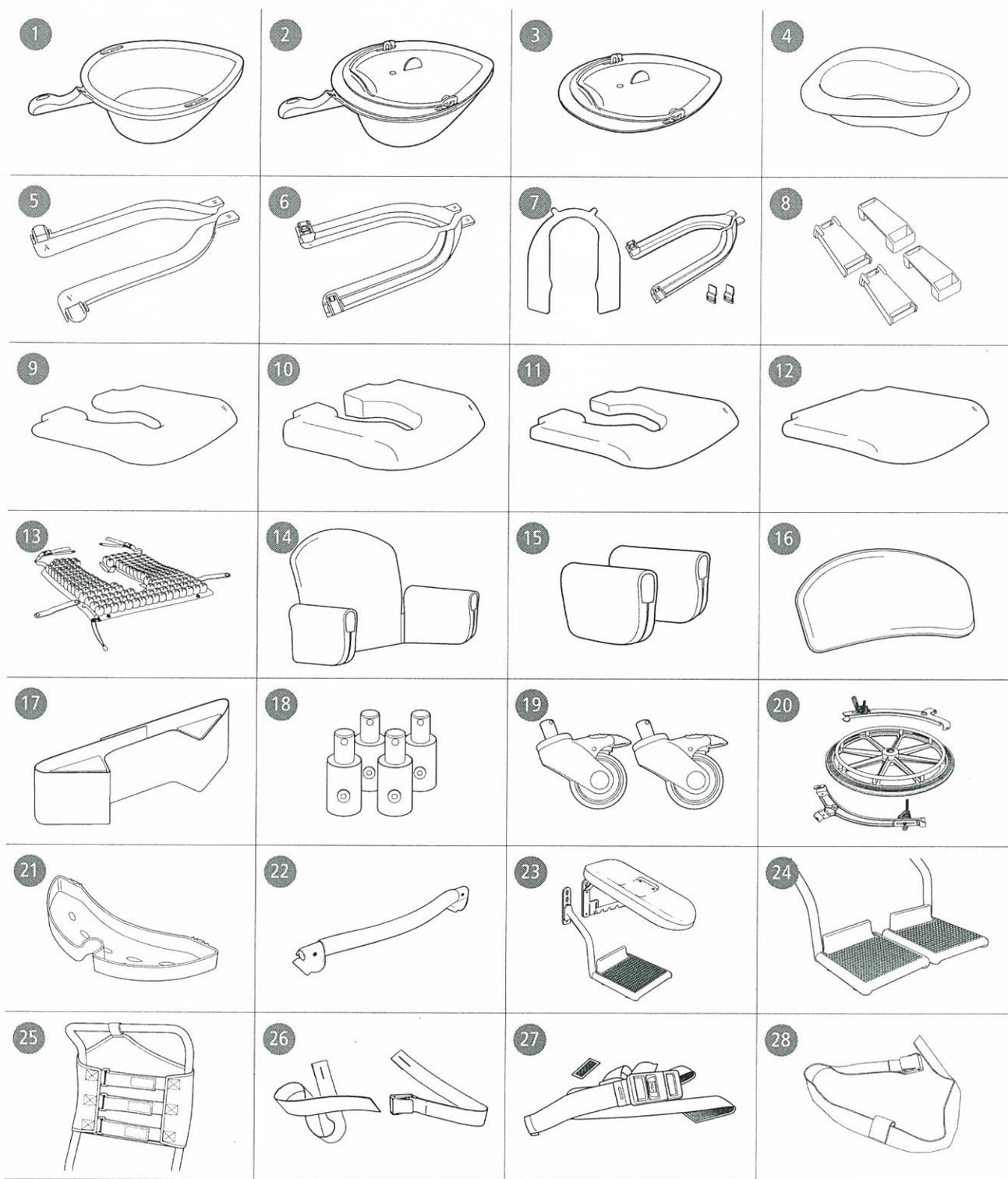

Français

Clean	Clean 24"	Clean HRB
-------	-----------	-----------

Appuis-bras Voir figure D

- D1. Les appuis-bras sont rabattables et amovibles.
 D2. Les appuis-bras sont verrouillables.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Réglage de la hauteur Voir figure E

E1-3. La hauteur peut être réglée facilement en plaçant la vis sur la position souhaitée.



Ne pas utiliser le siège si les écrous à ailettes sont desserrés.



Contrôler que les quatre roues sont réglées de la même manière afin de ne pas compromettre la stabilité du siège.

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Repose-pieds Voir figure F

- F1. Le soignant peut facilement pousser le repose-pieds avec son pied.
 F2. Le repose-pieds est amovible.
 F3. Le repose-pieds comporte 4 positions de réglage de la hauteur et de l'angle.
 F4. Le repose-pieds comporte 8 positions de réglage de la hauteur et de l'angle.
 F5. De nombreuses possibilités de réglage sont possibles en déplaçant la cheville.



Ne pas utiliser la position la plus basse du repose-pieds quand le siège est réglé sur la hauteur 47,5 cm.



Retirer les chevilles quand le repose-pieds est retiré.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Rembourrage du dossier Voir figure G

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Frein utilisateur Voir figure H

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Accessoires Voir figure I

La section dédiée aux accessoires indique toutes les options disponibles pour votre chaise de douche. Des écarts par rapport à la version standard peuvent être constatés selon les marchés. Les combinaisons d'accessoires peuvent être limitées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.etac.com.

Voir figure I

Clean	Clean 24"	Clean HRB
-------	-----------	-----------

Voir figure I

Clean	Clean 24"	Clean HRB
-------	-----------	-----------

I1. Bassin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I2. Bassin et couvercle avec anse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I3. Couvercle avec anse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I4. Bassin jetable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I5. Glissière pour bassin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I6. Support pour baquet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I7. Support jetable pour bassin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I8. Attaches pour bassin/baquet de faible encombrement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I9. Siège souple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I10. Siège Comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I11. Coussin Comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I12. Coussin entier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I13. Coussin de protection ROHO, limitation de pression	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I14. Rembourrage Comfort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I15. Coussin d'appui-bras, paire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I16. Dossier souple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I17. Soutien du tronc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I18. Cales de surélévation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I19. Deux roulettes verrouillables de 75 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I20. Adaptateur de roue arrière	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I21. Porte-savon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I22. Barre transversale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I23. Repose-jambes, réglable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I24. Repose-pied, pliable et amovible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I25. Rembourrage du dossier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I26. Ceinture de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I27. Ceinture de positionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I28. Ceinture pectorale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>