



Lisez attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.

Caractéristiques techniques :

Bois



Anatomique



BEC




Référence	Modèle	Pliant			Non pliant
	Couleur (tube)	Noir	Noir floral	Bleu Daisy	Noir
* poignée bois	SA1141005	SA1142000	SA1143000	/	
* poignée anatomique	D : SA1123000 G : SA1124000	/	/	D : SA1121005 G : SA1122005	
* poignée BEC	SA1164000	SA1165000	SA1166000	SA1161005	
Hauteur	84 à 94 cm			75 à 98 cm	
Poids et Matière	0,4 kg / aluminium				
Poids maximum supporté	= 113 kg				

L'utilisation de cannes dépend fortement de l'incapacité à marcher. Demandez à un professionnel de santé de vous en expliquer le fonctionnement et d'en effectuer le réglage. Un mauvais réglage peut altérer le fonctionnement de la canne ou engendrer une surcharge pour l'utilisateur. Se conformer aux instructions d'utilisation. En cas de doute, adressez-vous à votre revendeur.

Instructions d'utilisation :

Comment régler votre canne

- Déplier la canne (modèle pliant) en emboîtant les segments entre eux.
- Dévisser la bague anti-vibrations ① située en haut pour les cannes pliantes ou à la base pour les cannes non pliantes.
- Appuyer sur le bouton poussoir visible à travers l'un des trous de réglage.
- Ajuster la longueur de la canne à la hauteur désirée.
- Positionner le trou en face du bouton poussoir de façon à ce qu'il s'enclenche parfaitement.
- Revisser la bague de blocage.

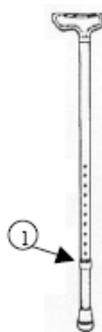


Comment marcher avec votre canne

- Tenir la canne **dans la main opposée à la jambe invalide**.
- Former un triangle d'appui. Placer le pied de la jambe valide en arrière du corps, et le pied de la jambe invalide à l'opposé de la canne pour former un triangle. L'extrémité du pied de la jambe invalide doit être alignée avec la canne.
- Avancer la jambe valide à l'avant du corps en conservant une position triangulaire.
- Avancer ensuite la jambe invalide et la canne en même temps devant le pied de la jambe valide. S'assurer que l'embout de la canne repose et adhère bien sur le sol.
- Faire des petits pas pour garder l'équilibre.



Comment tenir votre canne

- Mettre vos chaussures habituelles.
- Le haut de la canne doit se trouver à la même hauteur que votre hanche.
- Placer la canne à 15 cm devant vous et 15 cm sur le côté. Dans ces conditions, votre avant bras doit former un angle de 20 à 30° par rapport au sol.

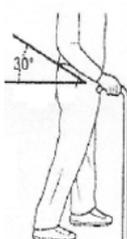

Recommandations / Avertissements de sécurité avant d'utiliser la canne :

- Avant chaque utilisation, s'assurer que le bouton poussoir est bien enclenché et que les segments des cannes pliantes sont correctement et suffisamment emboîtés les uns dans les autres (Attention au risque de pincement lors de cette manipulation).
- Etre extrêmement vigilant en cas de sol humide, gelé ou enneigé. Des dalles mouillées peuvent aussi constituer un danger de glissement.
- Les cannes ne doivent pas être utilisées pour supporter des personnes > à 113 kg.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que l'embout antidérapant est en bon état et efficace. Ne plus utiliser la canne si elle est endommagée ou déformée car elle ne garantirait plus la stabilité requise.
- Si possible, faire appel à une tierce personne pour emprunter des escaliers.
- Dans la mesure du possible, se faire accompagner et soutenir par une tierce personne afin de prévenir toute chute.

Entretien régulier :

- Ne jamais nettoyer la poignée ou l'embout avec des produits gras à base d'huile. Risque de chute !**
- Nettoyer régulièrement la canne à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le produit).
- Vérifier régulièrement l'état de l'embout antidérapant, le remplacer dès qu'il est dégradé.
- Vérifier la solidité de la canne qui ne doit pas être détériorée, ni présenter de fissure.
- Seules les pièces de rechange fournies exclusivement par Dupont Médical peuvent être utilisées.**

Conditions de garantie :

Les cannes sont garanties pendant un an. Cette garantie correspond à un emploi normal et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



DUPONT MEDICAL - Parc d'activités Eiffel Energie - Site de Ban la Dame - 54390 FROUARD (France)

Tel 03 83 495 495 - Fax 03 83 495 496 - www.dupont-medical.com

Fabriqué par : Homecare Enterprise (Taiwan) - Distribué par : DUPONT MEDICAL

