

PLOTS SURÉLÉVATEURS



Référence	Désignation
CT03PLO01	Plots surélévateurs (jeu de 4)

Atouts :

- Réhaussent les meubles (lit, chaise, fauteuil, canapé...) pour en faciliter l'accessibilité et/ou augmenter la hauteur d'assise.
- Permet aux personnes à mobilité réduite de s'asseoir ou de se relever plus facilement.
- Simple à installer.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des faiblesses musculaires.

Description :

- Réhaussement de 13 cm
- Poids net d'un plot : 218g
- Diamètre base : 16,5 cm
- Diamètre sommet : 11 cm
- Hauteur : 15 cm
- Diamètre maximum des pieds de meuble : 8 cm
- Charge maximale supportée : 130 kg répartis uniformément sur les 4 plots (meuble et utilisateur compris).

Composition :

- Polypropylène

Entretien :

- Lavage avec un détergent neutre.
- Ne pas utiliser de produits et éponges abrasifs.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser les 4 plots contenus dans la boîte séparément.
- Respecter le diamètre maximal d'utilisation des plots.
- Ne pas excéder le poids maximal autorisé.
- Vérifier le bon positionnement des plots et la stabilité du meuble avant utilisation.
- Utiliser uniquement sur une surface plane et non glissante.
- Tenir le produit éloigné des endroits humides, de toute source de produit liquide et de toute source de chaleur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 16 x 29 x 16 cm.
- Poids brut : 1 kg.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45