

Lire attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.



Caractéristiques techniques :

- Hauteur poignée (a) : ajustable de 33 à 43 cm (5 positions) par clips en U
- Hauteur pieds (b) : ajustable de 44 à 54 cm (5 positions) par bouton poussoir
- Longueur base (c) : ajustable de 83 à 111 cm (12 positions) par bouton poussoir
- Longueur poignée : 50 cm
- Diamètre poignée : 3,5 cm
- Matières : structure : acier époxy - poignée : mousse polyuréthane

POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ :  = **113 kg**

Demandez à un professionnel de santé de vous expliquer le fonctionnement de la chaise.

Instructions de montage : La poignée de sortie de lit est livrée démontée. L'assemblage s'effectue sans outil.

1. Enlever le matelas du lit.
2. Retirer les 2 clips en plastique fixés sur les pieds en forme de L (b), emmancher la poignée (a) (recouverte d'un long manchon en mousse) sur les 2 pieds (b) puis replacer les 2 clips.
3. Fixer le tube en forme de U pour former la base (c) qui viendra en appui sur le sommier. A l'aide des boutons poussoirs, ajuster la longueur de la base (c) à la largeur du lit ; de façon à obtenir un appui stable et efficace sur le sommier. S'assurer que les 2 boutons poussoirs se verrouillent parfaitement et complètement.
4. Placer la base (c) sur le sommier et ajuster la entre le pied et la tête du lit, à la position la mieux adaptée au patient.
5. Utiliser les boutons poussoirs pour ajuster la hauteur des 2 pieds (b), de sorte que les embouts antidérapants reposent bien à plat sur le sol et que la base (c) soit en appui sur toute la largeur du sommier.
6. Remettre le matelas en position.
7. Ajustez la poignée d'appui (a) à la hauteur souhaitée par le patient et vérifier la solidité et la stabilité de l'ensemble.
8. **ATTENTION : Vérifier que les 4 boutons poussoirs et les 2 clips de réglage sont parfaitement et complètement engagés.**
9. Assister le patient lors des premières utilisations et réajuster la position de la base (c) ainsi que la hauteur de la poignée (a) si nécessaire.

Instructions d'utilisation et recommandations :

- La poignée ne doit pas être utilisée pour supporter un poids de plus de **113 kg**.
- Le sol doit être plan, stable (ne jamais placer les pieds de la poignée sur un tapis).
- Vérifier, avant chaque utilisation, que tous les composants sont solidement fixés et que les 2 pieds touchent le sol.
- Vérifier que la poignée est bien positionnée sur ses pieds et qu'elle est parfaitement stable.
- Ne jamais modifier les réglages si l'utilisateur est en appui sur la poignée.
- Ne rien accrocher ou suspendre sur la poignée.

Entretien régulier :

- Cette poignée requiert un nettoyage à l'aide d'un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer la poignée.
- Vérifier régulièrement l'état des 2 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier régulièrement l'état des éléments de fixation et que les tubes ne sont ni tordus ou endommagés.
- Contrôler régulièrement que les boutons poussoirs et les clips sont tous parfaitement et complètement engagés.
- Faire vérifier la poignée, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.

Conditions de garantie :

La poignée est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de la poignée et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final.

Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.