

SURÉLÉVATEUR DE TOILETTES EN MOUSSE INJECTÉE

Références	Désignation
09/7300	Sans couvercle
09/7301	Avec couvercle



Atouts :

- Grande stabilité.
- Facilité d'utilisation et de mise en place.
- Mousse injectée pour un confort optimal.

Mode d'emploi :

- Avant toute mise en place, il est nécessaire de s'assurer de la bonne tenue de la cuvette des toilettes.



Pour le modèle avec couvercle, ne pas extraire le *Rehosoft®* son emballage par le couvercle

- Montage : Poser simplement le surélévateur sur la cuvette des toilettes. Le *Rehosoft®* s'emboîte parfaitement et s'adapte à la majorité des cuvettes.
- La grande stabilité du *Rehosoft®* permet une sécurité d'utilisation optimale.

Description :

- Dimensions : l 40 x L 42 x H 17 cm
- Hauteur de surélévation : 11,5 cm
- Poids net sans couvercle : 2,4 kg, poids net avec couvercle : 3 kg
- Poids maximum d'utilisation : 120 kg

Composition :

- Enveloppe en Polychlorure de Vinyle (PVC),
- Mousse de Polyuréthane injectée,
- Couvercle en Polypropylène

Entretien :

- Nettoyage : Eau savonneuse et tous produits courants.
- Désinfection : Dilution chlorée, aérosol de désinfection.

Précautions d'emploi :

- Ne pas immerger l'arrière du *Rehosoft®*.
- Éviter au maximum le contact avec des produits colorés.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 43 x 44,5 x 19,5 cm.
- Poids brut sans couvercle : 2,8 kg, poids brut avec couvercle : 3,4 kg.