



Lisez attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.



Caractéristiques techniques :

- Dimensions hors tout maxi. (lxpxh) : 61 x 49 x 82 cm
- Dimensions hors tout mini. (lxpxh) : 56 x 49 x 72 cm
- Hauteur réglable par bouton poussoir : de 72 à 82 cm
- Couleur : blanc
- Matière : structure : acier - accoudoirs : plastique Polyéthylène Haute Densité
- Poids : 4.4 kg

POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ : = 100 kg

Instructions d'assemblage et de fonctionnement :

Le cadre est livré démonté. Il se compose de :

- ① montant accoudoir gauche
- ② montant accoudoir droit
- ③ barre avant (x2)
- ④ clips demi-lune de fixation (x4)
- ⑤ pied réglable avec embout antidérapant (x4)

1- Suivre le schéma de montage ci-contre pour procéder à l'assemblage du cadre.


(Attention) : s'assurer que les 4 embouts antidérapants sont suffisamment fixés).

2- Régler la largeur du cadre à l'aide des 4 clips demi-lune ④.

(Attention) : les 4 clips doivent être bien enclenchés et positionnés au même niveau sur les 2 barres avant du cadre).

3- Régler la hauteur des 4 pieds ⑤ du cadre à l'aide des boutons poussoirs.

(Attention) : les 4 boutons poussoirs doivent être bien enclenchés et positionnés au même niveau sur les 4 pieds du cadre).

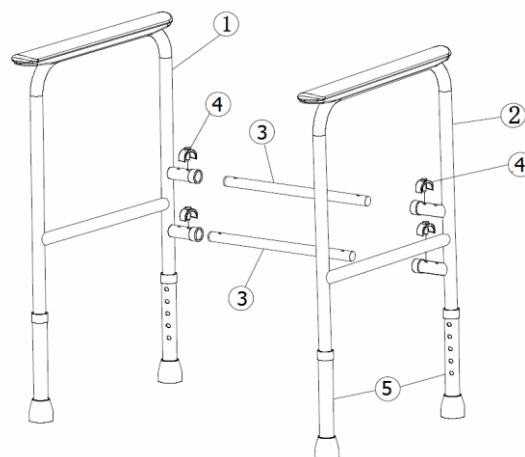

Recommandations / Avertissements de sécurité avant d'utiliser le cadre :

- Le cadre Monoï est conçu pour une utilisation exclusive dans les toilettes. Ne pas l'utiliser comme un cadre de marche pour se déplacer.
- Avant chaque utilisation, vérifier que le cadre est bien positionné sur ses 4 pieds et qu'il est parfaitement stable.
- Respecter impérativement le sens de positionnement du cadre devant les toilettes comme montré sur la photo.
- Le sol doit être plan, stable et sec.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir assis seul (veiller à sa stabilité).
- Le cadre ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 100 kg.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que les pieds réglables ⑤ sont bien au même niveau et qu'ils sont correctement fixés.
- Vérifier que les 2 barres avant ③ sont fixées dans les trous de positionnement situés au même niveau.
- Vérifier que les 4 embouts antidérapants sont en bon état et efficaces.
- Contrôler que les clips demi-lune ④ de fixation du cadre sont tous correctement et complètement fixés.
- Ne jamais tenter de déplacer le cadre lorsque l'utilisateur est assis sur les toilettes.

Entretien régulier :

- Après utilisation essuyer le cadre avec un chiffon sec. Stocker le cadre dans un endroit ventilé et sec.
- Nettoyer régulièrement le cadre à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le produit).
- Vérifier régulièrement l'état des embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier la solidité du cadre qui ne doit pas être détérioré, ni présenter de fissure. Les tubes ne doivent pas être tordus ou endommagés.
- Vérifier régulièrement la stabilité du cadre, les 4 pieds doivent reposer simultanément sur le sol.
- Vérifier que les clips demi-lune de fixation du cadre sont suffisamment enfoncés.
- **Faire vérifier le cadre, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

Conditions de garantie :

Le cadre est garanti pendant un an. Cette garantie correspond à un emploi normal et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.