



**REHAUSSEUR DE TOILETTES AVEC POIGNEES/ACCOUDOIRS
AMOVIBLES**

VR224J



AVANT UTILISATION

- Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car cela pourrait endommager la surface du produit.
- Vérifiez le produit pour tout dommage visible. Si vous constatez des dommages ou suspectez un défaut, n'utilisez pas votre produit, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

UTILISATION PRÉVUE

Le siège de toilette surélevé Viscount avec accoudoirs est conçu pour s'adapter à la majorité des formes de cuvettes de toilette. Les poignées ont pour but d'aider l'utilisateur à monter et descendre du siège. Veuillez noter que l'utilisateur ne doit pas utiliser les accoudoirs pour supporter tout son poids corporel car cela pourrait endommager l'appareil et compromettre la sécurité de l'utilisateur.

SÉCURITÉ

- Consultez votre médecin ou votre fournisseur pour déterminer le réglage et l'utilisation appropriés de l'appareil.
- Ne vous penchez pas hors du siège de toilette surélevé Viscount pour éviter de tomber de l'appareil.
- Le siège de toilette surélevé Viscount est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Vérifiez soigneusement que toutes les vis sont serrées avant utilisation.
- Revoir la limite de poids et la charge de poids avant utilisation. Ne pas utiliser si vous dépassez la limite de poids.
- N'apportez aucune modification à cet appareil.
- Vérifiez toujours la stabilité avant utilisation.

NETTOYAGE

Nettoyez votre siège de toilette surélevé Viscount à l'aide d'un nettoyeur non abrasif ou d'un détergent doux avec un chiffon doux. Les nettoyeurs abrasifs peuvent endommager le produit de manière irréparable et ne doivent pas être utilisés. Assurez-vous toujours que votre siège de toilette est essuyé après le nettoyage.

En cas de désinfection à la chaleur, l'une des trois températures et durée d'exposition suivantes peut être utilisée:

- a) une température de 90 ° C pendant 1 minute
- b) une température de 85 ° C pendant 3 minutes
- c) une température de 80 ° C pendant 10 minutes

INSTALLATION

- 1 - Assurez-vous d'inspecter le produit pour tout dommage visuel avant utilisation.
- 2 - Retirez soigneusement le siège et le couvercle des toilettes existants de la toilette.
- 3- Pour installer les poignées, vous devez appuyer sur les poussoirs et les insérer dans les tubes de montage. Assurez-vous qu'ils sont verrouillés en place. Pour retirer les poignées, inversez cette étape.
- 4 - Placez soigneusement le siège sur la cuvette des toilettes. Positionnez correctement le siège de toilette surélevé sur le bord des toilettes en vous assurant que la lèvre avant est à l'extérieur du réceptacle. (voir fig.1).
- 5- Assurez-vous que le support de réglage avant dégage le rebord afin que le siège de toilette soit bien en place.
- 6- Pour serrer, tournez le volant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 2).
- 7- Vérifiez la stabilité avant utilisation.
- 8 - Pour le démonter, il suffit de dévisser le volant et de retirer le siège de toilette surélevé en le soulevant.



fig. 1



fig. 2

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Veillez faire un contrôle de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des inquiétudes.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations données dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie ou établissant un contrat ou autre engagement d'Aidapt Bathroom Limited ou de ses agents ou de ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant l'information est donnée.

Faites preuve de bon sens et ne prenez pas de risques inutiles lors de l'utilisation de ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter votre part de responsabilité pour la sécurité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter la personne qui vous a délivré ce produit ou le fabricant (détaillé ci-dessous) si vous avez des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre produit.

Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9 3EX
Telephone: +44 (0) 1744 745 020 • Fax: +44 (0) 1744 745 001 • Web: www.aidapt.com
Email: • sales@aidapt.co.uk