





o uso de aparelhos por crianças e portadores de deficiência requer sempre a vigilância atenta de um adulto em plena posse de suas faculdades mentais;

- não pue caber de alimentação o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada elétrica;
- a ficha do cabo de alimentação é o elemento de separação da rede elétrica; manter a conexão a ficha de alimentação após colocar o aparelho em funcionamento;
- não desconectar a ficha de alimentação imediatamente, assegure-se de que o dafado elétrico, apresentado na placa de dados no fundo do aparelho, esteja correspondente aos da rede de distribuição elétrica;

Caso a ficha fornecida com o aparelho seja incompatível com a tomada da rede elétrica, procure o pessoal qualificado para efetuar a substituição da ficha por uma adequada. Em geral, o desligamento de adaptadores, simples ou múltiplos, evita acidentes. Caso o uso desses dispositivos seja indispensável, será necessário utilizar tipos que atendam às normas de segurança, prestando atenção para não superar os limites máximos de alimentação suportados, indicados nos adaptadores e extensões.

Não deixe o aparelho conectado inutilmente; desconecte a ficha da rede de alimentação quando o aparelho não estiver sendo utilizado.

11. A instalação deve ser efetuada de acordo com as instruções do fabricante. A instalação incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou objetos, em relação aos quais o fabricante não poderá ser considerado responsável.

12. O uso de alimentação deste aparelho não deve ser substituído pelo uso normal. No caso de deterioração do cabo, para a sua substituição, procure um centro de assistência técnica autorizado pelo fabricante.

13. É recomendável desmontar o cabo de alimentação em todo o seu comprimento, para evitar sobrecarregamentos perigosos.

14. Antes de efetuar qualquer manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha.

15. Alguns componentes do aparelho têm dimensões muito pequenas e podem ser engolidos por crianças; conserve o aparelho fora do alcance das crianças.

16. Caso se decida não utilizar mais o aparelho, ele deverá ser eliminado de acordo com as regulamentações vigentes.

17. Assegure-se de:

- utilizar este aparelho somente com medicamentos prescritos pelo seu médico;
- não utilizar este aparelho utilizando sempre o mesmo método de acordo com a patologia;
- usar o acessório "aplicador nasal" somente quando expressamente indicado pelo médico e prestando atenção para NUNCA introduzir no nariz as bufrulações, limitando-se a apertá-las no máximo possível;
- 18. Verifique que o folheto informativo do medicamento esteja insensivelmente relacionado à utilização com sistemas comuns de aerossoterapia;
- 19. Para evitar entalstamentos ou encharcamentos, manter os cabos e todos os afeiros fora do alcance das crianças.

20. Não posicionar o aparelho em modo que seja difícil operar o dispositivo de desconexão.

21. Para maior segurança higiênica, recomendamos que não utilize os mesmos acessórios em mais do que um paciente.

## INSTRUÇÕES PARA O USO

O aparelho deve ser controlado antes de cada utilização a fim de detectar anomalias de funcionamento e/ou danos decorrentes do transporte ou do armazenamento.

- Durante a instalação, sente numa posição ereta e relaxada à mesa, não numa poltrona, para evitar a compressão das vias respiratórias que podem comprometer a eficácia do tratamento.

- Após ter montado o aparelho da embalagem, controle se existem danos evidentes; preste atenção especial à tampa no plástico que podem deixar alguns vestígios de uso; verifique o funcionamento do aparelho.
- Antes de utilizar o aparelho, efetue as operações de desinfeção segundo as descrições do capítulo LIMPEZA E MANUTENÇÃO.
- Abra o nebulizador rodando a parte superior no sentido anti-horário (Fig. B).
- Conecte a extremidade do tubo de saída do fundo do nebulizador ao cone de condução do ar situado na parte interna do nebulizador (Fig. C).
- Verta a quantidade de medicamento indicado pelo seu médico no nebulizador (Fig. D).
- Feche o nebulizador enovando no sentido horário as duas partes, prestando atenção para que fiquem bem apertadas (Fig. E).
- Conecte uma extremidade do tubo de saída do fundo do nebulizador ao suporte (Fig. F) e a outra extremidade à saída do ar (Fig. G) no aparelho.
- Para utilizar a máscara, insira a diatreme no nebulizador (Fig. H).
- Inicie a ficha de alimentação; a máscara tomada de corrente após assegurar-se de que a alimentação de rede corresponda aos dados da placa do aparelho.
- Para iniciar o tratamento, coloque o interruptor I/O no posição "I".

ATENÇÃO: O aparelho e a parte us interiormente, 30 min LIMAGD/30 min DESLIGADO.

- Inspire a solução do aerosol utilizando o acessório prescrito.
- Após terminar o tratamento, desligue o aparelho colocando o interruptor I/O no posição "O" e desconecte a ficha da rede de alimentação elétrica.
- Limpe o nebulizador e os seus acessórios como descrito no capítulo "LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ACESSÓRIOS".
- Os dispositivos não necessitam de calibração.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

A limpeza do aparelho deve ser efetuada com um pano macio e seco e com substâncias detergentes não abrasivas.

**ATENÇÃO: durante a execução das operações de limpeza, assegure-se de que não possam penetrar substâncias líquidas no aparelho e que a ficha de corrente esteja desligada.**

**LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS ACESSÓRIOS**

As seguintes instruções indicam as relativas à limpeza e à desinfeção dos acessórios, pois eles são fundamentais para o desempenho do produto e para o sucesso terapêutico.

- No fim de cada aplicação:** Desmonte o nebulizador rodando a parte superior no sentido anti-horário e remova o cone de condução do medicamento. Lave os componentes do nebulizador com água morna e um aplicador neutro, em seguida enxágue-os em água fervente por 5 minutos. Monte novamente os componentes do nebulizador e conecte o a saída do ar (Fig. G) deixando funcionar o aparelho por 10-15 minutos.
- As máscaras devem ser lavadas com água quente no fervente.**
- Não lave e não deixe autoclavegar nas máscaras e no tubo de ar.**
- 2. Esterilização:** Utilize soluções esterilizantes a fim de seguir as instruções do fabricante.
- SUBSTITUIÇÃO DO NEBULIZADOR** O nebulizador deve ser substituído após um longo período de inatividade, caso apresente deformações ou rompimentos ou caso o bico nebulizador esteja obstruído por medicamentos ressecçados, pó, etc.
- 3. LIMPEZA:** acabeça substituir o nebulizador após um período de tempo compreendido entre 6 meses e 1 ano, de acordo com a utilização.
- 4. Utilize somente nebulizadores originais.**
- SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DO AER** O filtro do aparelho, o filtro do ar deve ser substituído após 500 horas de funcionamento ou após um ano. A Model Group S.p.A. aconselha conectar periodicamente o filtro do ar (10-12 nebulizações) e, caso apresente uma coloração anormal ou mancha ou esteja húmido ao tato, efetue a sua substituição. Extraia o filtro (Fig. A-5) e substitua por um novo. Não tente limpar o filtro para reutilizá-lo; o filtro de ar não deverá ser alvo de operações de reparação ou manutenção.
- Use somente filtros originais! Não utilize o aparelho sem filtro.**

**POSSÍVEIS PROBLEMAS E RESPOSTAS SUGERIDAS**

Em caso de problemas com o Centro de Assistência autorizada sempre que precisar de ajuda para a utilização e a manutenção do aparelho.

**Problema:**

- não funciona corretamente
- não nebuliza ou nebuliza insuficientemente

**Possível solução:**

- Assegure-se de que a ficha esteja bem inserida na tomada de corrente
- Assegure-se de que o aparelho não tenha trabalhado além dos limites de funcionamento indicados neste manual (30 min LIMAGD/30 min DESLIGADO).
- Assegure-se de que as unidas do tubo do ar estejam bem inseridas nos conectores do compressor e do nebulizador.
- Verifique se o nebulizador não esteja vazio e que tenha a quantidade correta de medicamento (Másc. 8 ml). Assegure-se de que o bico do nebulizador não esteja obstruído.

Caso o aparelho não vá a funcionar corretamente, procure o **CUSTOMER SERVICE MEDTEL**.

**MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO**

No caso de defeito, procure pessoal qualificado autorizado pela Model Group S.p.A. Nunca abra o aparelho. O aparelho não tem nenhuma parte no seu interior que possa ser reparada por pessoal não qualificado e não requer manutenção interna e/ou lubrificação.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS**

Condições ambientais recomendadas para o uso:

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Funcionamento:</b>                   | <b>Temperatura:</b>       |
| MIN: 25°C - MAX: +70°C                  | MIN: 10% RH - MAX: 95% RH |
| Pressão atmosférica: 700 hPa - 1060 hPa |                           |

**EL**

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal
70. Aplicador nasal
71. Aplicador nasal
72. Aplicador nasal
73. Aplicador nasal
74. Aplicador nasal
75. Aplicador nasal
76. Aplicador nasal
77. Aplicador nasal
78. Aplicador nasal
79. Aplicador nasal
80. Aplicador nasal
81. Aplicador nasal
82. Aplicador nasal
83. Aplicador nasal
84. Aplicador nasal
85. Aplicador nasal
86. Aplicador nasal
87. Aplicador nasal
88. Aplicador nasal
89. Aplicador nasal
90. Aplicador nasal
91. Aplicador nasal
92. Aplicador nasal
93. Aplicador nasal
94. Aplicador nasal
95. Aplicador nasal
96. Aplicador nasal
97. Aplicador nasal
98. Aplicador nasal
99. Aplicador nasal
100. Aplicador nasal

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΗ MEDEL Family Plus - (Fig. A)**

5. Nó para o suporte
6. Nó para o suporte
7. Aplicador nasal
8. Aplicador nasal
9. Suporte para o aera
10. Suporte para o aera
11. Aplicador nasal
12. Aplicador nasal
13. Aplicador nasal
14. Aplicador nasal
15. Aplicador nasal
16. Aplicador nasal
17. Aplicador nasal
18. Aplicador nasal
19. Aplicador nasal
20. Aplicador nasal
21. Aplicador nasal
22. Aplicador nasal
23. Aplicador nasal
24. Aplicador nasal
25. Aplicador nasal
26. Aplicador nasal
27. Aplicador nasal
28. Aplicador nasal
29. Aplicador nasal
30. Aplicador nasal
31. Aplicador nasal
32. Aplicador nasal
33. Aplicador nasal
34. Aplicador nasal
35. Aplicador nasal
36. Aplicador nasal
37. Aplicador nasal
38. Aplicador nasal
39. Aplicador nasal
40. Aplicador nasal
41. Aplicador nasal
42. Aplicador nasal
43. Aplicador nasal
44. Aplicador nasal
45. Aplicador nasal
46. Aplicador nasal
47. Aplicador nasal
48. Aplicador nasal
49. Aplicador nasal
50. Aplicador nasal
51. Aplicador nasal
52. Aplicador nasal
53. Aplicador nasal
54. Aplicador nasal
55. Aplicador nasal
56. Aplicador nasal
57. Aplicador nasal
58. Aplicador nasal
59. Aplicador nasal
60. Aplicador nasal
61. Aplicador nasal
62. Aplicador nasal
63. Aplicador nasal
64. Aplicador nasal
65. Aplicador nasal
66. Aplicador nasal
67. Aplicador nasal
68. Aplicador nasal
69. Aplicador nasal</