

Le siège pivotant EDORA s'adapte sur la baignoire. Il permet à l'utilisateur de se transférer au dessus de la baignoire pour se doucher. L'installation sur le siège et la rotation de l'assise sont facilités grâce aux accoudoirs relevables et au levier disponible sur le côté sous l'assise.

Lisez attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.



**Caractéristiques techniques :**

- Dimensions hors tout maxi. (lpxh) : 720 x 540 x 520 mm
- Dimensions assise (lxp) : 420 x 350 mm
- Dimensions dossier (lxh) : 400 x 340 mm
- Hauteur accoudoir : 200 mm
- Largeur entre accoudoirs : 490 mm
- Angle de rotation : 360° (position de blocage tous les 90°)
- Couleur : blanc
- Matière : structure : acier époxy – siège : plastique souple
- Poids : 6 kg




**POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ:** = 130 kg

**Instructions d'assemblage et de fonctionnement :**

Le siège pivotant est livré démonté en 3 parties : siège①, accoudoirs②, et base③

Suivre les instructions pour procéder à son assemblage puis utilisation :

- 1- Insérer les accoudoirs ② de chaque côté du siège ①, en les fixant à l'aide du bouton poussoir. **S'assurer que chaque bouton poussoir soit bien positionné et enclenché dans le trou d'indexage du tube.**  
**Attention au risque de pincement lors de cette manipulation.**
- 2- Positionner l'ensemble siège + accoudoirs sur la base ③ en prenant soin de maintenir le levier de verrouillage pour que son extrémité puisse s'emboîter dans les encoches de blocage. Se reporter à la figure "A" ci-contre :  
(o) = position correcte / (x) = mauvaise position.  
**Attention :** vérifier que le siège est correctement fixé sur la base.
- 3- Relever le levier et s'assurer que le siège pivote bien à 360° sans difficulté ni points d'accroche et que le verrouillage est efficace dans les 4 positions de blocage. Vérifier également que les 4 embouts antidérapants sur la base ③ sont complètement et correctement fixés et qu'ils reposent bien sur les rebords de la baignoire.
- 4- Le siège est entièrement pivotant sur 360°. Pour effectuer la rotation, il suffit d'actionner le levier situé sous le cintre d'accoudoir ② puis de le relâcher quand la position souhaitée est obtenue (4 positions de blocage tous les 90°).
- 5- Les accoudoirs se relèvent verticalement afin de faciliter l'installation sur l'assise. Vérifier que les cintres des accoudoirs sont bien emboîtés dans les pontets avant de procéder à la rotation du siège.
- 6- Régler les butées latérales "B" en dévissant à la main les tiges filetées jusqu'à ce que les patins plastiques soient en contact avec les parois de la baignoire.  
**(Attention :** largeur mini. 460 mm - maxi. 640 mm).

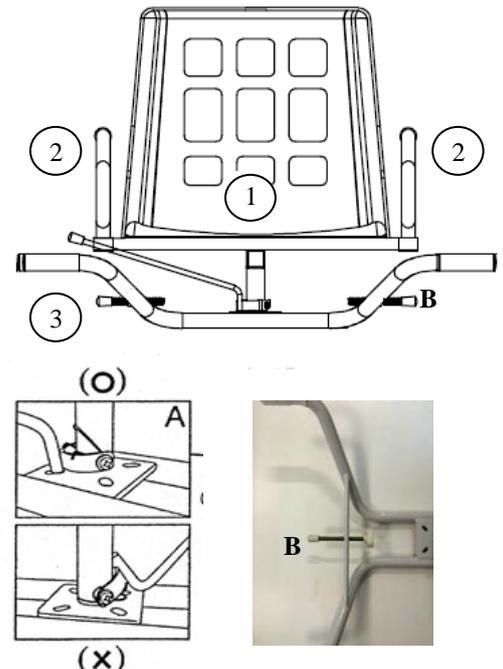

**Recommandations / Avertissements de sécurité avant d'utiliser le siège :**

**L'utilisation d'un produit en milieu humide constitue un risque potentiel de glissement, il est primordial de le manipuler avec la plus grande prudence.**

- Avant chaque utilisation, vérifier que le siège est bien positionné sur ses supports latéraux et qu'il est parfaitement fixé et stable.
- Toujours verrouiller la rotation du siège avant de s'asseoir ou de se relever ou d'effectuer le transfert du patient.
- Pendant la rotation s'assurer que les accoudoirs sont abaissés et fixés dans les pontets.
- L'assise doit être sèche avant de s'asseoir pour éviter tout risque de glissement.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir assis seul (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Le siège pivotant ne doit pas être utilisé pour supporter des personnes de plus de 130 kg.
- Le siège est réservé exclusivement à un usage dans une baignoire.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que le siège est solidement fixé, que les 4 embouts antidérapants sont en bon état et efficaces.
- Ne pas se mettre debout sur le siège.
- Ne jamais tenter de déplacer le siège lorsque l'utilisateur est assis dessus.
- Ne jamais laisser bouger l'utilisateur si l'assise pivotante n'est pas verrouillée et les accoudoirs fixés dans les pontets.
- Lors de la manipulation, faire attention de ne pas mettre les doigts au niveau de la zone de rotation du siège.

**Entretien régulier :**

- Après utilisation enlever tout excès d'eau sur et sous le siège puis l'essuyer avec un chiffon sec. Stocker le siège dans un endroit ventilé & sec.
- Nettoyer régulièrement le siège à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le produit).
- Vérifier régulièrement l'efficacité du levier de blocage et l'état des embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier la solidité du siège qui ne doit pas être détérioré, ni présenter de fissure.
- Vérifier régulièrement la stabilité du siège, les 4 embouts de la base doivent reposer simultanément sur les rebords de la baignoire.
- **Faire vérifier le siège, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.**

**Conditions de garantie :**

Le siège est garanti pendant un an. Cette garantie correspond à un emploi normal et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.