

ROULEAU ADHESIF POUR LE BAIN TENURA

Référence	Désignation
SN04ROB02	Rouleau adhésif pour le bain Tenura



Atouts :

- Disques antidérapants.

Description :

- Pastilles de 4 cm de diamètre
- Nombre de pastilles dans un rouleau : 72 environ
- Rouleau de 3 m
- Poids net : 105 g

Mode d'emploi :

- La température de la surface à traiter ne doit pas être inférieure à 10°C.
- S'assurer que la surface est propre, sèche et non grasse.
- Retirer délicatement la bande protectrice en évitant de toucher l'adhésif.
- Appuyer fermement sur le ruban adhésif en appliquant une pression uniforme.

Composition :

- PVC

Entretien :

- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Précautions d'emploi :

- Stocker à température ambiante (10-25°C) et à l'abri de l'humidité.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, encombrement : 10 x 10 x 5,5 cm.
- Poids brut : 125 g.