


INSTRUBAC 4L

Protocole de traitement de l'Instrubac

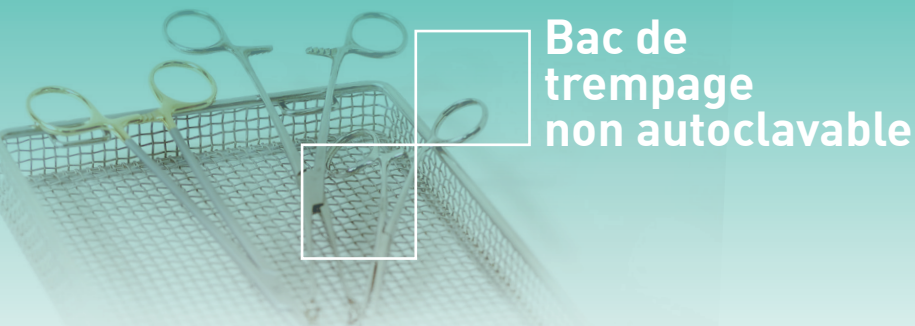

NETTOYAGE

Les Instrubacs 4L sont conçus pour être **lavés manuellement** avec un détergent/désinfectant. Se reporter au protocole interne de l'établissement.

STOCKAGE


Les bacs non traités doivent être stockés dans leur emballage d'origine.

Un second emballage est conseillé, par exemple, une boîte cartonnée.

Les bacs doivent être **stockés dans un endroit sec** (minimum supérieur à 4°C) **sans contact direct** avec le sol.

RÉFÉRENCES

- ① Bac simple.....Réf. 404 157
- ② Bac double.....Réf. 404 158

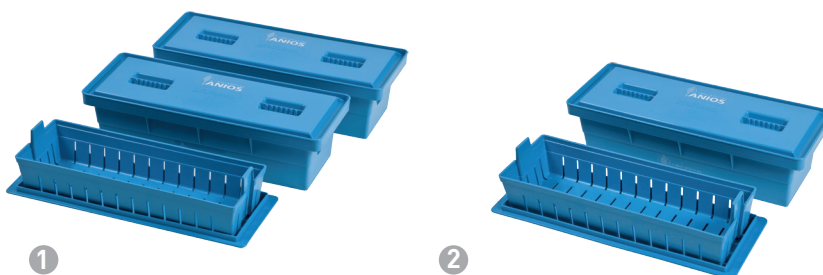


RECOMMANDATIONS :

- Les bacs ne sont pas autoclavables. Ils ne sont pas conçus pour un nettoyage en laveuse automatique.
- Une inspection visuelle est nécessaire pour évaluer l'usure du bac dû à son utilisation. S'il est endommagé, ne pas utiliser le bac et le signaler.

INSTRUBAC 4L

Cleaning protocol of Instrubac

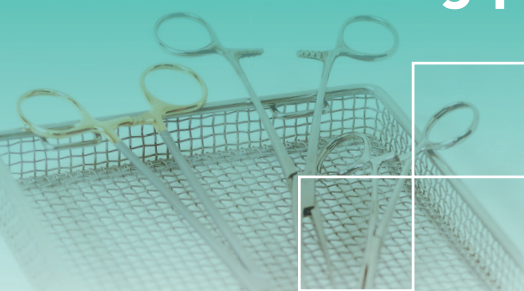

Non-autoclavable
soaking
tank



CLEANING


Instrubac 4L are designed so as to be **manually cleaned** with detergent/desinfectant. See protocol established in your department.

STORAGE

Untreated tanks must be stored in their original packaging.
Secondary packaging is recommended, for example, a cardboard box.
The tanks must be stored **in a dry place** (minimum 4°C) **without direct contact** with the ground.

REFERENCES

- ① Simple bac.....Ref. 404 157
- ② Double bac.....Ref. 404 158

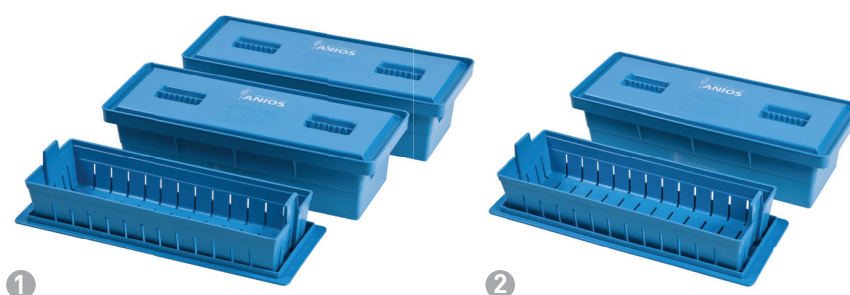

RECOMMANDATIONS :

- The tanks are not autoclavable. They are not designed for a cleaning in automatic washer machine.
- A visual inspection is necessary to evaluate wear to the tank due to its use. If it is damaged, do not use the tank and report it.