

BROSSE DE DOUCHE 2 FACES

Référence	Désignation
SN05BRD06	Brosse de douche 2 faces



Atouts :

- Manche long et orientable.
- 2 faces différentes : 1 côté doux nettoyant, 1 côté grattoir.
- Permet un lavage aisé de toutes les parties du corps, sans effort et sans se baisser.

Mode d'emploi pour donner une forme incurvée au manche :

- Faire couler de l'eau chaude ou chauffer le manche en plastique au sèche-cheveux pendant 5 à 10 minutes afin de ramollir le plastique.
- Plier le manche pour lui faire prendre la forme voulue.
- Faire couler de l'eau froide pendant 5 minutes, afin de maintenir la forme voulue.

Description :

- Dimensions : 64 x 12 x 6 cm
- Poids net : 160 g

Composition :

- EVA
- Elastomère
- Mousse polyuréthane

Entretien :

- Nettoyage à l'eau savonneuse.

Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser l'eau chaude et le sèche-cheveux simultanément.
- Aucune partie de la peau ne doit être en contact avec l'eau chaude ou la chaleur du sèche-cheveux qui peuvent provoquer de graves brûlures.
- Ne pas utiliser le sèche-cheveux près d'un point d'eau.
- L'eau chaude et la vapeur peuvent provoquer de graves brûlure, faire preuve d'une extrême prudence.
- Vérifier la température de l'eau avant de tremper l'éponge dans l'eau chaude afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Ne pas exposer à une flamme.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12 x 64 x 9 cm.
- Poids brut : 290 g.

PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN

Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45