

# BROSSE PÉDICURE DE DOUCHE



Référence	Désignation
SN05BPD06	Brosse pédicure de douche

## Atouts :

- Manche long et orientable.
- Permet d'atteindre les orteils, sans effort et sans se baisser.
- Poignée antiglisse pour une bonne préhension.

## Indications :

Pour personne :

- Ayant des problèmes de dos.
- A mobilité réduite.
- Souffrant de problèmes articulaires...

## Mode d'emploi pour donner une forme incurvée au manche :

- Faire couler de l'eau chaude ou chauffer le manche en plastique au sèche-cheveux pendant 5 à 10 minutes afin de ramollir le plastique.
- Plier le manche pour lui faire prendre la forme voulue.
- Faire couler de l'eau froide pendant 5 minutes, afin de maintenir la forme voulue.

## Description :

- Dimensions : 62,5 x 9 x 9 cm
- Poids net : 155 g

## Composition :

- EVA
- Elastomère
- Mousse polyuréthane

## Entretien :

- Nettoyage à l'eau savonneuse.

## Précautions d'emploi :

- Ne pas utiliser l'eau chaude et le sèche-cheveux simultanément.
- Aucune partie de la peau ne doit être en contact avec l'eau chaude ou la chaleur du sèche-cheveux qui peuvent provoquer de graves brûlures.
- Ne pas utiliser le sèche-cheveux près d'un point d'eau.
- L'eau chaude et la vapeur peuvent provoquer de graves brûlure, faire preuve d'une extrême prudence.
- Vérifier la température de l'eau avant de tremper l'éponge dans l'eau chaude afin d'éviter tout risque de brûlure.
- Ne pas exposer à une flamme.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

## Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 12 x 64 x 9 cm.
- Poids brut : 290 g.

**PHARMAOUEST INDUSTRIES - Actipole 35 - BP 12 - 2, Rue de Saint-Coulban 35540 MINIAC MORVAN**

**Tél. +33 (0)2 99 82 21 21 - Fax +33 (0)2 99 82 15 45 - Fax Vert 0800 87 70 45**