

BARRES D'APPUI A VENTOUSES

Références	Désignation
SN03BAS29	Barre d'appui à ventouses 29 cm
SN03BAS40	Barre d'appui à ventouses 40 cm
SN03BAC04	Barre d'appui coudée à ventouses



Coudée



40 cm



29 cm

Atouts :

- Aide au soutien pour faciliter l'accès à la baignoire, douche, wc, cuisine...
- Munie de 2 indicateurs (ou 3 pour la barre coudée) d'adhérence de 2 couleurs :
 - Rouge ne pas utiliser, la ventouse est mal installée.
 - Vert : la barre d'appui peut être utilisée.

Indications :

Pour personne :

- A mobilité réduite.
- Ayant des difficultés à se mouvoir...

Description :

- Dimensions :
 - 29,5 x 11 x 9 cm, poids net : 270 g
 - 40 x 8 x 9,5 cm, poids net : 312 g
 - 50 x 11 x 9 cm (coudée), poids net : 440 g
- Supporte jusqu'à 48 kg de force de traction pour une utilisation à un angle de 45°.
- Supporte jusqu'à 70 kg de force de traction pour une utilisation à un angle de 90°.

Composition :

- ABS

Entretien :

- Eau chaude et savon. Ne pas utiliser de produits et éponges abrasifs.

Précautions d'emploi :

- Il est de la responsabilité de l'installateur de vérifier que le support qui reçoit les barres d'appui soit suffisamment résistant. Les supports poreux ou fragiles tels que le plâtre, les murs peints, le bois sont par exemple à proscrire.
- Avant chaque utilisation, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier que les ventouses soient bien adhérentes (signal vert).
- Les barres d'appui ne sont pas conçues pour supporter la totalité du poids d'une personne. L'utilisateur doit toujours avoir un point d'appui complémentaire à la barre d'appui lui permettant d'éviter une chute en cas de défaillance de celle-ci.
- Bien vérifier les voyants de sécurité.
- Ne pas installer sur une surface humide et /ou non lisse.
- Ne pas positionner sur une vitre ou un miroir.
- Ne pas se suspendre à la barre.
- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton
- 29 cm : Encombrement : 10,5 x 42 x 10,5 cm, poids brut : 365 g.
- 40 cm : Encombrement : 10,5 x 42 x 10,5 cm, poids brut : 412 g.
- Coudée : Encombrement : 12 x 64 x 9 cm, poids brut : 575 g.