

CONSIGNES DE SECURITE



TOUJOURS fixer cette barre d'appui à l'aide des fixations adéquates, sur le type de surface indiqué et dans les conditions de charge conformes.



TOUJOURS lire ces instructions d'installation avant de procéder à l'installation de ce produit.



TOUJOURS faire installer les barres d'appui par un installateur formé et compétent.



TOUJOURS faire correspondre les fixations aux trous de la barre d'appui.



JAMAIS installer des fixations à tête fraisée diminue la solidité de votre barre d'appui, sa résistance et annule toute garantie.



JAMAIS agrandir les trous de fixation.

ATTENTION agrandir les trous de fixation diminue la solidité de votre barre d'appui, sa résistance et annule toute garantie.



NE PAS placer de cigarette à proximité de ce produit.



ATTENTION aux pincettes lors du relevage de la barre.

CE Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive pour les dispositifs médicaux 93/42/EEC et des échantillons représentatifs ont été évalués dans le cadre EN12182:1999 et EN12727:2000. Pour utilisation comme barre relevable (d'assistance de classe 1). Déclaration émise sous la seule responsabilité du fabricant.

Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et peut compromettre la sécurité du produit.

Les mesures tout au long de ces instructions d'entretien, d'installation et d'utilisation ont été converties du système métrique au système impérial, par conséquent, toutes les dimensions sont approximatives et sujettes à des tolérances de fabrication. Ces instructions sont offertes selon les recommandations des normes minimales d'installation et de pratiques recommandées pour les installations. En raison de la variabilité très large de conditions d'installation possibles AKW Ltd ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, ni n'accepte aucune responsabilité à l'égard de cette information ou à son utilisation. Ces informations sont fournies à la condition que la personne qui le reçoit doit faire son / ses propres tests afin de déterminer la pertinence de celle-ci pour son usage particulier. Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et peut compromettre la sécurité du produit. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Commandes
0032 (0)68 33 48 99

Informations
0032 (0)68 33 48 99

Informations techniques
0032 (0)68 33 48 99

Fax
0032 (0)68 33 16 58

Site web
www.akw-medicare.com

Commandes
ism@akw-medicare.com

Informations
ism@akw-medicare.com

Adresse
Zone industrielle Tournai Ouest
20 rue de la terre à briques
7522 Marquain
Belgique

Que faire si quelque chose se passe mal?

Dans le cas peu probable où une pièce serait manquante ou si quelque chose va mal, contactez le service client AKW qui vous fourniront des conseils supplémentaires et, si nécessaire organiser une visite d'un technicien.

Dans le cadre de notre programme de formation à la qualité, les appels peuvent être enregistrés ou écoutés. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

AKW®




Barres rabattables

Instructions d'installation et d'entretien




Veillez lire attentivement toutes les instructions AVANT de procéder à l'installation et les laisser à disposition de l'utilisateur final

01810WH/BU

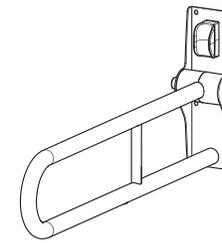


Barre rabattable

01820WH/BU

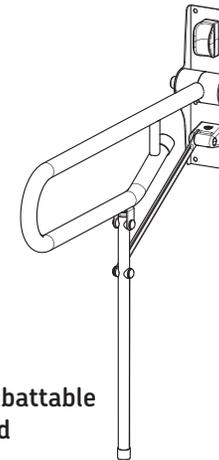


Barre rabattable avec pied

01830WH/BU

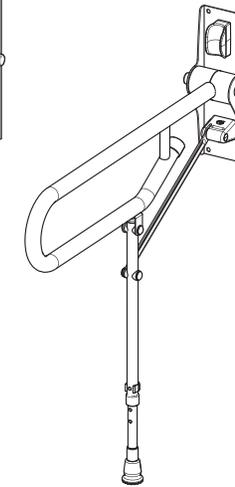


Barre rabattable avec pied réglable

01830SS

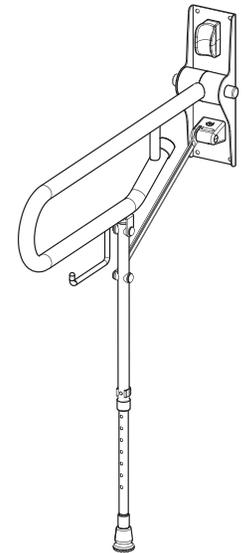

Barre rabattable avec pied réglable et support de papier toilette

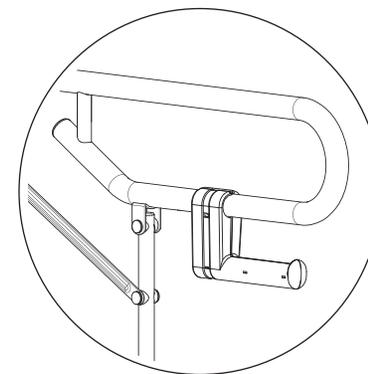

Support de papier toilette fourni avec les barres rabattables (01810WH/BU - 01820WH/BU - 01830WH/BU)

Couleur : Blanc RAL 9016 / Bleu RAL 5005 / Acier inoxydable

Utilisation à l'intérieur

Modèles enregistrés : EU000694781-0001/2/3 En attente de brevet

Installateur : assurez-vous que cette notice est laissée à l'utilisateur final.

Instructions d'installation

AKW vous recommande de suivre ces recommandations lors de l'installation de la barre rabattable :

Si vous installez un barre métallique dans l'espace de douche, il est peut-être nécessaire de raccorder la barre à la terre pour se conformer au règlement IEE des installations électriques et métalliques dans les salle de bains.

Toutes les barres rabattables AKW sont conçues et testées pour respecter la norme BS EN 12182.

L'utilisation des barres rabattables est prévue pour un usage intérieur.

Les barres peuvent être installées dans d'autres endroits mais la durée de vie du produit ne sera peut-être pas atteinte.

Si vous n'êtes pas sûr du type de fixation ou de visserie à utiliser, consultez un fabricant de fixations en indiquant le type de mur, de construction, de surface et de barre rabattable. **Tous les trous de fixation doivent être utilisés.**

Nous ne sommes pas en mesure de stipuler le type de fixation à utiliser en raison du très grand nombre de types et états possibles de surfaces verticales sur lesquelles la barre peut être fixée.

Les recommandations ci-dessus sont proposées pour garantir une durée de vie optimale du produit.

Instructions d'entretien

Les barres en métal AKW sont développées pour promouvoir la mobilité des utilisateurs et sont conçues pour une utilisation domestique. Elles sont destinées à être utilisées pour fournir une préhension suffisante et pour aider les changements de position autour des toilettes, de la douche ou du bain.

Les barres rabattables doivent être utilisées uniquement pour l'usage qu'elles sont censées faire. Ne pas les utiliser pour lier ou accrocher des objets. Cela peut avoir des effets néfastes sur la durabilité et la sécurité de la barra.

Les barres rabattables doivent faire l'objet d'un programme de maintenance et d'entretien planifié. Les objets qui montrent des signes d'un dommage ou d'une usure doivent être remplacés.

Garder votre barre rabattable propre

Ce produit doit être nettoyé périodiquement en utilisant des produits de nettoyage domestiques pour la salle de bains.

Après le nettoyage, toujours rincer à l'eau, puis essuyez avec un chiffon humide pour enlever tous les résidus de produit de nettoyage.

Ne pas utiliser des acides, alcalins ou autres produits de nettoyage puissants ou concentrés, car ils peuvent décolorer ou endommager le produit.

Désinfection

Lorsque la désinfection est nécessaire, des procédures standards pour la désinfection du matériel doivent être utilisées en tenant compte des avertissements concernant les effets possibles des produits chimiques agressifs sur les revêtements plastiques.

Conditionnement

La barre est fournie dans des sacs en polypropylène (PP) afin de conserver le produit propre jusqu'à son installation ; les pièces peuvent éventuellement être emballées en vrac dans une boîte en carton. Les deux types d'emballage peuvent être recyclés et doivent être jetés conformément à la réglementation locale en matière de recyclage.

Spécifications du produit et dimensions

Barre rabattable avec pied : 200kg (441lb/31.5 stone)

Barre rabattable avec pied réglable : 200kg (441lb/31.5 stone)

Matériaux de construction :

01810WH/BU / 01820WH/BU / 01830WH/BU

Barre : Acier

Plaque de fixation : Acier

Finition : Poudre de résine epoxy polyester, testé à ASTM B117-87 (96 heures de test à l'eau salée)

01830SS

Barre : Acier inoxydable 304

Plaque de fixation : Acier inoxydable 304

Finition : Acier inoxydable poli

Caractéristiques

Nom	Longueur	Diamètre
Barre rabattable avec pied :	766mm (30 ¹ / ₈ "	32mm (1 ¹ / ₄ "
Barre rabattable avec pied réglable :	766mm (30 ¹ / ₈ "	32mm (1 ¹ / ₄ "

Note: Le pied réglable peut s'ajuster (in 25mm / 1" increments) à une hauteur minimale de 680mm (26³/₄") et à une hauteur maximale de 880mm (34⁵/₈")

* La capacité de poids se réfère uniquement à la barre et non aux fixations ou à la surface de montage.

Plage de température de fonctionnement : -5°C to +35°C.

Pour fixer le support de papier toilette sur la barre : (01810WH/BU - 01820WH/BU - 01830WH/BU)

Retirer le bouchon de trou de positionnement de la barre. Localiser la broche de positionnement et enclenchez le support de papier au niveau de la moitié de la barre. Refermez-le fermement.

