

NOTICE

1820218000	TABOURET DOUCHE JOLETI
------------	------------------------

1. Ce produit doit être placé dans un intérieur ventilé, lisse et non corrosif
2. Les produits ne doivent pas être placés dans un environnement à haute ou basse température, il est facile de provoquer le vieillissement des pièces en caoutchouc et un phénomène élastique insuffisant
3. Avant utilisation, assurez-vous que toutes les fixations sont correctement vissées et ajustées à la bonne hauteur. Lors du levage ou de l'abaissement, ils doivent être dans la même position de trou.
4. Vous ne devez en aucun cas vous mettre debout sur le fauteuil ni vous balancer en position assise.
5. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la vis n'est pas desserrée et que l'usure du repose-pied, si nécessaire, remplacez-la à temps



max 150 kg
test 180 kg

Check all parts



x 1



x 1



x 1



x 4




x 5



x 5



1 Retourner le plateau et monter le 1^{er} arceau à l'aide des visses

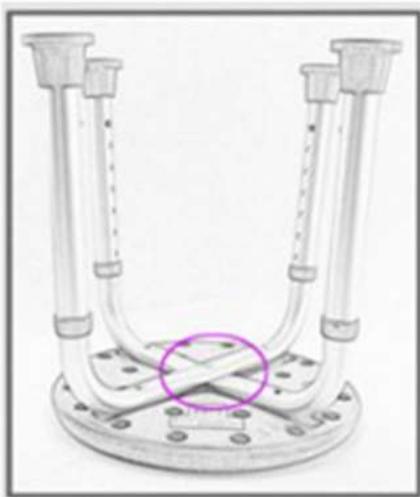

2 : monter le 2eme arceau et venir emboiter les 4 pieds.