



Chaise de douche



VB540B

Notice d'utilisation et d'entretien

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté chez Aidapt la chaise de douche. Avec une utilisation et un entretien adaptés, elle est conçue pour vous servir et vous satisfaire pendant de nombreuses années.

NB. Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

Limite de poids de 120 kg (18 ¾ stones)

Veillez ne pas excéder la limite de poids indiquée, un manquement à cette recommandation pourrait mettre à risque son utilisateur.

AVANT UTILISATION

- Retirez parfaitement l'emballage. Évitez d'utiliser un couteau ou tout instrument coupant qui pourrait endommager le produit.
- Vérifiez tout dégât visible sur votre produit. En cas de dommage ou de défaut suspect, veuillez ne pas utiliser votre produit et contactez immédiatement votre fournisseur.

LISTE DES COMPOSANTS

NO.	DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS	QTÉ
7	Assise du Siège		1
6	Goupille	Ø 8	4
5	Rondelle	Ø 6	5
4	Vis	M6x35	5
3	Tube Télescopique		4
2	Tube Inférieur		1
1	Tube Supérieur		1

PROCÉDURE D'ASSEMBLAGE

1. Raccordez le tube inférieur au tube supérieur comme indiqué sur la fig. 1
2. Mettez le siège à l'envers et fixez les tubes précédemment joints entre eux dans la fente du siège en veillant à ce que les marques correspondent comme sur la fig. 2 puis serrez les vis.
3. Retournez le tabouret de douche monté et posez-le sur une surface plane. Réglez chaque pied à la même hauteur comme sur la fig. 3. N'oubliez pas de vérifier les goupilles après utilisation.

NB. Nous vous recommandons de ne pas utiliser un tournevis fonctionnant avec une batterie lors de l'assemblage de ce produit.

SCHÉMA D'ASSEMBLAGE

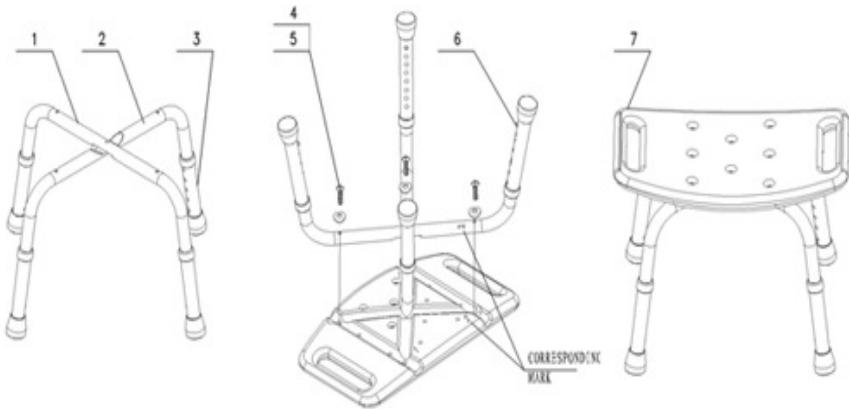


fig. 1

fig. 2

fig. 3

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

1. Appuyez sur la goupille de sécurité et tournez le pied d'extension sur le côté afin de vous permettre d'ajuster le pied d'extension à la hauteur désirée.
2. Remplacez le pied de façon à permettre à la goupille de sécurité de ressortir du trou et de fixer la hauteur adaptée.
3. Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour chaque pied, en vous assurant que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur.

NETTOYAGE

Tous les composants du produit sont fabriqués à partir de matériaux de qualité. Cependant, il est très important de nettoyer vos chaises et tabourets de douche en utilisant un détergent non abrasif ou doux avec un chiffon doux en évitant d'utiliser un produit détartrant. Les détergents abrasifs de type AJAX et ou les nettoyeurs et tampons abrasifs pourraient endommager sérieusement votre produit sans possibilité de réparation.

Ne pas dépasser une température de 50°C lors du nettoyage de siège, cela endommagerait le plastique de manière permanente.

N.B. Un nettoyage quotidien et régulier réduit la formation de dépôt calcaire sur votre produit.

RÉUTILISATION

Si vous réutilisez ce produit ou si vous êtes sur le point de le réutiliser, veuillez vérifier minutieusement la sûreté de tous les composants. Cela comprend:

- Tubes courbés ou endommagés ou des fissures aux joints des tubes.
- Agrandissement des trous d'ajustement.
- Attaches desserrées ou abîmées.
- Viroles lisses, abîmées ou fendues (extrêmes en caoutchouc).

Remplacez toutes les pièces abîmées ou manquantes lorsque nécessaire. En cas de doute, veuillez ne pas utiliser le produit et contactez immédiatement votre fournisseur.

SOIN ET ENTRETIEN

Effectuez un contrôle régulier de votre produit ou dans le cas où vous auriez un doute.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les informations contenues dans ce livret d'instructions ne doivent pas être considérées comme faisant partie de ou établissant un contrat ou un engagement quelconque par la société Aidapt Bathrooms Limited, Aidapt (Wales) Ltd ni par ses représentants ou ses filiales et aucune garantie concernant les informations n'est donnée.

Nous vous remercions de bien vouloir faire preuve de bon sens et de ne pas prendre de risques inutiles lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter et être conscient de votre responsabilité quant à votre sécurité lorsque vous utilisez ce produit.

Veuillez ne pas hésiter à contacter la personne qui vous a fourni ce produit ou le fabricant (coordonnées ci-dessous) pour davantage de renseignements concernant l'installation/utilisation de votre produit.

Altai France (Altai Europe Ltd)

Z.A. du Bel Air, 17D rue de Creil, 95340 BERNES-SUR-OISE, France

Tél: 01.30.34.90.84 | Fax: 01.30.34.00.68 | E-mail: altaieurope@orange.fr