



La poignée HANDY sert de point d'appui à l'utilisateur pour lui permettre d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. Elle dispose de 2 niveaux d'appui.

Lire attentivement les instructions et mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

**Caractéristiques techniques :**

- Hauteur : 32 cm
- Largeur : 23 cm
- Largeur de fixation : ajustable de 8 à 17 cm
- Matière : plastique
- Couleur : blanc
- Poids : 1,95 kg

POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ :  = **135 kg**

Demander à un professionnel de santé de vous expliquer le fonctionnement.

Instructions d'installation :

1. Bien nettoyer et sécher entièrement le bord de la baignoire avant d'installer la poignée. La surface doit être propre et exempte de tout résidu ou de trace de savon.
2. Relever la manette latérale (A) et la tourner pour écarter la fixation à une largeur légèrement supérieure à l'épaisseur de la baignoire.
3. Poser la poignée sur le rebord de la baignoire (manette positionnée vers l'intérieur de la baignoire), la maintenir droite, puis serrer la manette latérale (A) jusqu'à ce que la fixation soit bien en contact avec le bord de la baignoire. Une fois terminé, abaisser la manette latérale (A) pour verrouiller l'ensemble.

Attention : Etre très prudent lors de l'installation sur une baignoire en fibre de verre. Eviter de trop serrer car l'étau pourrait briser la fibre de verre.

4. S'assurer de la solidité de l'installation en tirant sur la poignée dans tous les sens. Si la poignée glisse, bouge ou se déplace, contrôler que le serrage est suffisant et/ou que la surface de la baignoire est bien lisse, propre et sèche, puis recommencer.

**Instructions d'utilisation et recommandations :**

- La poignée ne doit pas être utilisée pour supporter un poids de plus de **135 kg**.
- L'installation doit se faire sur une surface lisse, propre et sèche pour assurer une fixation optimale.
- La poignée doit être fixée bien droite de manière à être complètement en appui sur le rebord de la baignoire.
- Vérifier régulièrement la solidité de l'installation. Périodiquement il peut être nécessaire de resserrer la fixation.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se maintenir seul debout.
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- L'installation d'un tapis antidérapant au fond de la baignoire est recommandée en complément de l'installation de la poignée.
- Ne jamais retirer la poignée si l'utilisateur est en appui.

Entretien régulier :

- Essuyer la poignée après utilisation pour enlever tout excès d'eau.
- Cette poignée requiert un nettoyage à l'aide d'un chiffon doux (utiliser de l'eau tiède et un détergent doux).
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer la poignée.
- Vérifier régulièrement l'état du système de serrage, il ne doit pas être endommagé.
- Faire vérifier la poignée, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Dupont Médical.

Conditions de garantie :

La poignée est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de la poignée et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non-respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Dupont Médical.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final.

Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.