

PROTOCOLE D'UTILISATION

FILTRE ANTI-GERMES

FILTRANIOS 31DA+

MISE EN PLACE DU FILTRE


**PURGER
LE ROBINET**


1



Ouvrir le sachet stérile.

2



Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette repositionnable et la coller sur le cahier de traçabilité.

3



Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.

4



Adapter le filtre sur le raccord rapide et éliminer le sachet.

5



Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.

Éviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.

Ne pas nettoyer le filtre.

Ne pas ôter le filtre avant la période des 31 jours.

Changer impérativement le filtre au 31^{ème} jour d'utilisation.