

ENFILE-BOUTON

Référence	Désignation
CT01ENF03	Enfile-bouton



Atouts :

- Aide à l'habillement.
- Permet d'accrocher les boutons de chemise, de pantalon, de veste plus facilement.

Indications :

Pour personne :

- Ayant des difficultés de préhension (polyarthrite, arthrose, hémiplegie,...).
- Ayant des problèmes articulaires.
- Faiblesse musculaire.

Mode d'emploi :



- Insérer la partie métallique dans la boutonnière.
- Attraper le bouton.
- Faire glisser l'ensemble au travers de la boutonnière.

Description :

- Longueur : 16 cm (embout acier : 5,5 cm, poignée plastique : 10,5 cm)
- Poids net : 65 g

Composition :

- Plastique
- Acier

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 4 x 22 x 3 cm.
- Poids brut : 80 g.