



VM947B

Enfile Chaussette avec Chausse Pied



Ce fichier est disponible pour téléchargement au format PDF à l'adresse www.aidapt.co.uk. Les clients malvoyants peuvent utiliser un lecteur PDF gratuit (tel que adobe.com/reader) pour zoomer et augmenter la taille du texte pour plus de lisibilité.

Notice d'utilisation et d'entretien

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté l'enfile-chaussette Aidapt.

AVANT UTILISATION

- Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants afin de ne pas endommager la surface du produit.
- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage visible. Si vous constatez un dommage ou suspectez un défaut, n'utilisez pas votre produit, contactez votre fournisseur pour obtenir de l'aide.

UTILISATION PRÉVUE

The Sock Aid Slider is an aid to put on or take off your socks. The Sock Aid is compact which allows for easy storage.

CONSIGNES D'UTILISATION

1. Placez l'enfile-chaussette sur le sol.



2. Placez délicatement votre chaussette comme indiqué sur la photo.



3. Abaissez l'accessoire au sol tout en glissant votre pied dans votre chaussette.



NETTOYAGE

Nettoyez votre enfile-chaussette avec un nettoyant non abrasif ou un détergent doux avec un chiffon doux.

Les nettoyants abrasifs peuvent endommager le produit de manière irréparable et ne doivent pas être utilisés. Vérifiez toujours que vous avez bien essuyé le matériel après le nettoyage.

Si vous le désinfectez à la chaleur, l'une des trois températures suivantes et la durée d'exposition peut être utilisé:

- a) une température de 90 ° C pendant 1 minute
- b) une température de 85 ° C pendant 3 minutes
- c) une température de 80 ° C pendant 10 minutes

SOIN ET ENTRETIEN

Veillez effectuer une vérification de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des inquiétudes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Largeur 180mm
La taille. 270mm
Profondeur 110mm
Poids net 0,3 kg

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations données dans cette notice ne doivent pas être considérées comme faisant partie intégrante ou établissant un engagement contractuel ou autre de la part de Aidapt Bathrooms Limited ou de ses agents ou de ses filiales et aucune garantie ou représentation concernant les informations n'est donnée.

Veillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit; en tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit.

N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant le montage / l'utilisation de votre produit.



Altai Europe Ltd.

Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPELISSE, France

Tel: 05.63.65.48.15 Fax: 05.63.65.37.61

Email: Altai.Europe@orange.fr