



Loupe de table lumineuse Y006L

Ces instructions doivent être lues attentivement et laissées à l'utilisateur du produit pour une future consultation..

AVANT UTILISATION

Inspectez le produit, y compris son câble et sa prise afin de détecter tout signe éventuel de dommage. Si le produit est endommagé, NE l'utilisez PAS et contactez votre revendeur immédiatement.


- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils sont sous la surveillance d'un adulte ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre afin de comprendre les risques encourus.
- Cet appareil doit être utilisé sur une surface plane et stable.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser dans les salles de bain ni dans d'autres lieux humides ou mouillés.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou une carpe.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide. L'unité doit être éteinte et débranchée du secteur.
- Ne laissez pas la lumière directe du soleil ou une lumière intense briller à travers l'objectif. Risque d'incendie et de brûlure.
- Ne regardez pas directement le soleil ou une lumière vive à travers l'objectif. Risque de lésions oculaires.
- Avant de changer la lampe, assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché du secteur.
- Ne laissez pas cet appareil allumé sans surveillance.

FONCTIONNEMENT

Positionnez-le fermement sur une surface plane et stable et déployez l'appareil dans la position souhaitée. Branchez et allumez. Nettoyez seulement avec un chiffon un peu humide quand l'appareil est éteint. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un centre de réparation agréé.

Si la fiche secteur doit être remplacée, procédez comme ceci: Fusible 5A Connectez le fil marron à la borne étiquetée "L".

Connectez le fil bleu à la borne étiquetée "N". Assurez-vous que le serre-câble est correctement positionné (sur la gaine extérieure du câble) et qu'il est complètement resserré.

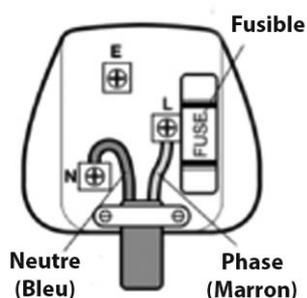

ELIMINATION ET RECYCLAGE

Vous ne devez pas jeter cet appareil avec les ordures ménagères. La plupart des autorités locales disposent d'un système de collecte spécifique pour les appareils et l'élimination est gratuite pour l'utilisateur final. Lors du remplacement d'un appareil existant avec un appareil neuf similaire, votre revendeur peut se charger du recyclage de l'ancien appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

230V @ 50Hz 11W

Lampe: T4 11W Lumière du jour

Avant de changer la lampe, assurez-vous que le produit est éteint et déconnecté du secteur.

Pour remplacer la lampe, procédez comme ceci :

- Retirez les 5 vis et dégagez le cache (voir fig. 1).
- Retirez la lampe et remplacez-la par une nouvelle lampe.
- Remplacez le couvercle en plexiglas et réinsérez les vis.



Fig. 1