


## FR HORLOGE CALENDRIER A LED

Cette horloge à LED affiche l'heure et la date en français dans l'ordre de lecture en toutes lettres et offre une excellente lisibilité.

Ce calendrier géant est idéal pour les personnes rencontrant des difficultés à se repérer dans le temps.

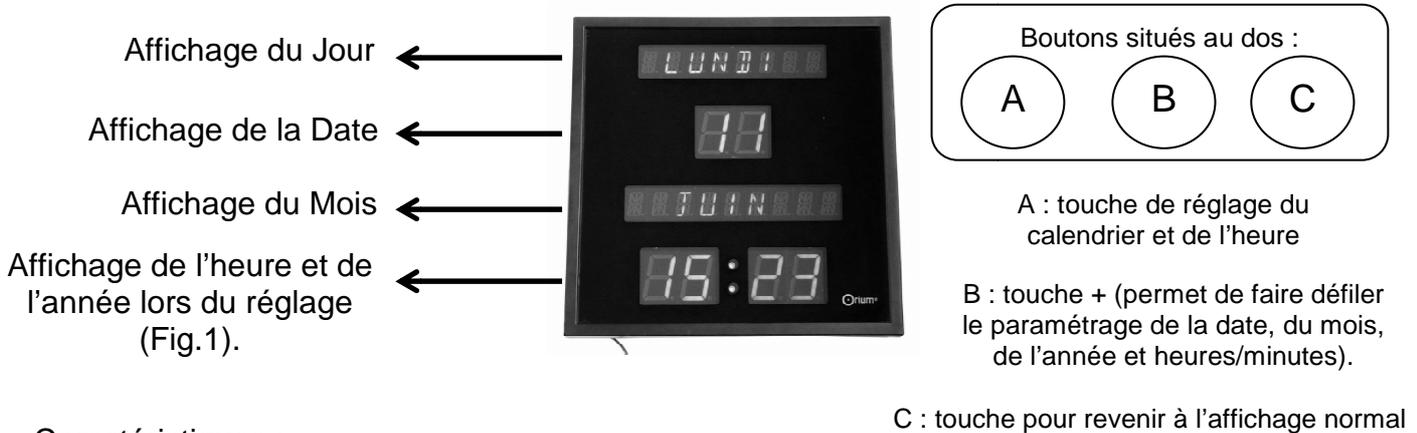

### Caractéristiques :

Affichage de l'heure en format 24h

Affichage du calendrier : jour / date / mois

Jour et mois : affichage en français en toutes lettres

Hauteur des lettres : 2cm env.

Hauteur des chiffres : 3.8 cm env.

Fonctionne sur secteur 220V

Batterie interne : permettant de garder les informations en mémoire, notamment en cas de coupure de courant

Dimensions : 28\*28 cm env.

### Installation:

Sortir délicatement l'horloge de son emballage.

Insérer l'adaptateur dans la pendule (dans le coin en bas à droite) et branchez-le sur votre prise électrique

### Réglage :

Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données usine : votre horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date.

En affichage normal, pressez le bouton A (situé au dos de l'horloge) pour paramétrer l'année (Fig.1). L'année apparaît au même emplacement que l'affichage de l'heure. Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes et les deux derniers clignotent.

Appuyer sur la touche B afin de régler l'année. Appuyer sur la touche A pour valider le réglage et passer au paramétrage suivant.

**Attention :** l'année ne s'affiche pas sur l'horloge en utilisation normale (hors paramétrage). Le réglage de l'année, lors du paramétrage, est nécessaire afin que les fonctions de l'horloge et du calendrier se mettent à jour automatiquement.

Le mois clignote : appuyer sur la touche B afin de régler le mois (Fig.2). Appuyer sur la touche A pour valider.

La date clignote : appuyer sur la touche B afin de régler la date (Fig.3). Appuyer de nouveau sur la touche A pour valider le réglage

Les heures clignotent : appuyer sur B pour régler l'heure puis A pour confirmer le réglage (Fig.4).

Les minutes clignotent : appuyez sur B pour régler les minutes puis A pour confirmer votre réglage (Fig.4).

**Attention** : suite aux précédents paramétrages, le jour se règle automatiquement.

Si le jour ne se paramètre pas correctement, cela signifie que l'année n'a pas été correctement paramétrée lors de la première étape des réglages (Fig.1) .

Reprendre les étapes des réglages.

En cas d'interruption du réglage pendant 20 secondes, l'horloge affiche l'heure.

Reprendre les étapes des réglages.

Fig.1 réglage de l'année



Fig.2 réglage du mois.



Fig.3 réglage de la date



Fig.4 réglage de l'horaire



*NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet. Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales*

