



VM925E – Applicateur pour gouttes ophtalmiques

## Utilisation prévue


Votre applicateur pour gouttes ophtalmiques Aidapt a été conçu pour vous aider lorsque vous vous administrez des gouttes ophtalmiques.

## Installation du flacon de gouttes ophtalmiques

1. Ouvrez le corps de l'applicateur en appuyant sur les guides de pouce.
2. Placez le flacon à l'intérieur de sorte que le cou du flacon repose fermement contre l'arête.
3. Desserrez le bouchon du flacon, mais ne le retirez pas complètement.
4. Fermez l'applicateur.

**SI VOUS SOUPÇONNEZ QUE L'APPLICATEUR EST DÉFECTUEUX, NE L'UTILISEZ PAS, ET CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR IMMÉDIATEMENT.**

## MODE D'EMPLOI

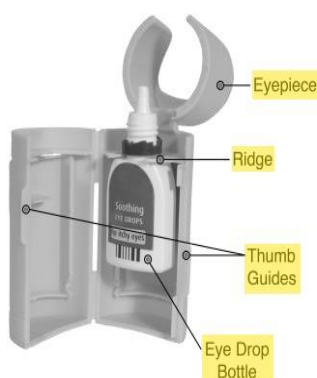

[Oculaire ; Arête ; Guides de pouce, Flacon de gouttes ophtalmiques]

1. Posez votre applicateur dans une position verticale et soulevez l'oculaire.
2. Ouvrez le capuchon du flacon et refermez l'oculaire.
3. Penchez la tête en arrière et positionnez l'oculaire sur l'œil veillant à ce que la lèvre de l'oculaire repose délicatement contre l'orbite supérieure.
4. Avec votre doigt, tirez la paupière inférieure vers le bas.
5. Serrez légèrement le distributeur pour administrer les gouttes oculaires. Une pression par goutte.
6. Lorsque vous avez terminé, ouvrez l'oculaire et resserrez le bouchon du flacon.

[Lèvre ; Oculaire ; Appuyez ici]

Aidapt  
Bathrooms  
Ltd., Lancots  
Lane, Sutton,  
St. Helens,  
Merseyside.  
WA9 3EX  
Website: [www.aidapt.com](http://www.aidapt.com)

