



Écrase-comprimés TOOKAN®

A.8.2



L'écrase-comprimés TOOKAN® permet de réduire les comprimés en poudre. Équipé d'une poignée permettant l'écrasement des comprimés sans effort, il convient à tous.

L'hygiène est respectée grâce aux sachets stockables dans le Tookan.

Aucune perte, ni contamination avec d'autres médicaments grâce aux sachets.



**Facile
d'utilisation**



Matériaux
résistants aux
produits de
désinfection
des milieux
hospitaliers

**Broyage
sans effort**

Stockage
des sachets
dans le broyeur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ Écrase-comprimés :

- base : tôle acier peinte époxy
- poignée : aluminium
- mâchoire : aluminium anodisé
- axes : inox

■ Sachets pour écrase-comprimés :

- polyéthylène basse densité transparent
- épaisseur : 180/200 µm
- respectent l'environnement



Désignation	Dimensions hors tout en mm (L x P x H)	Référence
Écrase-comprimés manuel TOOKAN®	265 x 75 x 90	2A000
Lot de 1000 sachets en polyéthylène	120 x 50	2A001


UTILISATION

1



Prenez un sachet rangé dans le bac de stockage.

2

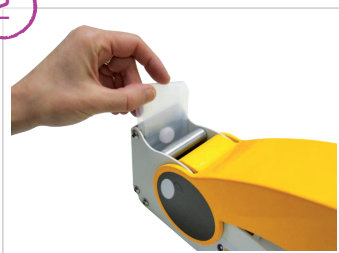

Placez le ou les médicaments dans le sachet, puis insérez-le dans la mâchoire du broyeur.

3



Donnez quelques pressions avec la paume de votre main...

4



... puis relâchez.

5



Vous pouvez récupérer les médicaments réduits en une fine poudre.

Photos non contractuelles

Praticdose®

315, rue Charles Sève
BP 29
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél. +33 (0)4 74 09 05 96
Fax +33 (0)4 74 09 05 98
praticdose@praticdose.fr

