



VM981A

Ouvre-Bocaux et Bouteilles Caoutchouté



Notice de'Utilisation et d'Entretien

INTRODUCTION

Merci d'avoir décidé d'acheter l'ouvre-bouteilles et bouchons Aidapt. Ce produit est fabriqué à partir des meilleurs matériaux disponibles. Lorsqu'il est utilisé correctement, il est conçu pour offrir un service fiable et sans problème pendant de nombreuses années.

AVANT UTILISATION

Retirez soigneusement tous les emballages. Évitez d'utiliser des couteaux ou d'autres instruments tranchants car cela pourrait endommager la surface du produit.

Vérifier que le produit n'est pas endommagé. Si vous constatez un dommage ou suspectez une panne, n'utilisez pas votre produit, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit est conçu pour aider les personnes dont la force de préhension est limitée ou qui ne peuvent utiliser qu'une seule main pour ouvrir les bouchons et les bouteilles tout en évitant les fuites.

MODE D'EMPLOI

L'ouvre-bouteilles et bouchons est simple à utiliser:

- Placez le pot, la canette ou la bouteille dans le creux qui vous convient le mieux.
- Utilisez votre main ou un ustensile de cuisine approprié pour saisir et tordre le couvercle, soulever le couvercle ou ouvrir la boîte.
- La base antidérapante maintiendra l'ouvre-bouteille en place lors de son utilisation, mais il peut être judicieux de le positionner contre un mur ou en hauteur pour une stabilité accrue.
- Il peut également être fixé de manière permanente sur un plan de travail ou rangé dans un tiroir prêt à être utilisé.

NETTOYAGE

Nettoyez votre ouvre-bouteilles et flacons à l'aide d'un nettoyant non abrasif ou d'un détergent doux et d'un chiffon doux. Les nettoyants abrasifs, par exemple AJAX et / ou les éponges de nettoyage abrasives peuvent endommager le produit et ne doivent pas être utilisés. Assurez-vous de toujours essuyer le produit après le nettoyage.

ENTRETIEN

Veillez effectuer une vérification de sécurité du produit à intervalles réguliers ou si vous avez des inquiétudes.

INFORMATION IMPORTANTE

Les informations contenues dans ce manuel d'instructions ne doivent en aucun cas être considérées comme faisant partie intégrante ou constituant un engagement contractuel ou autre de la part d'Aidapt Bathrooms Limited, de Aidapt (Wales) Ltd ou de ses agents ou de ses filiales. Aucune garantie ni représentation concernant les informations n'est donnée. Veuillez faire preuve de bon sens et ne prenez aucun risque inutile lorsque vous utilisez ce produit. En tant qu'utilisateur, vous devez accepter la responsabilité de la sécurité lors de l'utilisation du produit. N'hésitez pas à contacter votre revendeur si vous avez des questions concernant l'assemblage / l'utilisation de votre produit.

Altai Europe Ltd.

**Z.I. les Ports, Nafine, 82800 NEGREPELISSE,
France Tel: 05.63.65.48.15 Fax: 05.63.65.37.61
Email: Altai Europe@orange.fr**