

Civière de Relevage Aluminium

Réf. SBRAN12



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : mini: 120 x 44 x 9 cm / maxi: 210 x 44 x 9 cm

Dimension de l'emballage : 170 x 45 x 9cm

Poids net: 8.5kg/ Poids brut: 10.2kg

Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Cette civière de relevage avec une structure aluminium de haute résistance peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter des personnes blessées ou souffrant de fractures. Pouvant être ajustée grâce à ses deux parties distinctes, elle est facile à verrouiller et déverrouiller. Une fonction « cuillère » exercée par les deux lames longitudinales permet de la positionner sous le patient sans le déplacer. Sa longueur peut être ajustée pour correspondre à la longueur du corps du patient (de 120 à 210 cm). Après avoir transféré facilement la personne souffrante dans une ambulance, cette civière peut être immédiatement séparée en deux parties pour son pliage ou son stockage.

Approuvé pour son efficacité, cette civière de relevage est à la fois adaptée aux ambulances et aux hôpitaux en ce qui concerne le transport de personnes blessées lors de situations d'urgence.

III. Précautions d'utilisation :

Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.

IV. Entretien :

Veiller à un bon entretien au quotidien

Nettoyage avec un désinfectant de surface.

V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.



Manufacturer :

Zhangjiagang Xiehe Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.

NO.7th, MiddleXinzha Road, Zhashang Industrial Zone,

Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

EC	REP
----	-----

SUNGO EUROPE B.V.

Olympisch Stadion 24,

1076DE Amsterdam

Netherlands