

Barres d'appui en acier inoxydable poli

Instructions d'installation et d'entretien

Les barres d'appui AKW sont conçues pour un usage domestique comme une aide à la mobilité d'une personne dans son lieu d'habitation.

Elles sont destinées à être utilisées pour fournir une préhension supplémentaire ou faciliter les déplacements autour des portes, escaliers, douches, baignoires et autres applications similaires.

Les barres d'appui ne doivent être utilisées que pour les tâches auxquelles elles sont destinées. Ne pas l'utiliser pour lier des objets ou accrocher des éléments de sécurité. Ce peut être préjudiciable et cela affecte les caractéristiques et la sécurité. Les barres d'appui doivent être vérifiées dans le cadre d'un programme d'entretien planifié et des barres présentant des signes de détérioration ou de mauvaise utilisation doivent être remplacées dans les plus brefs délais.

Garder votre barre d'appui AKW propre

Ce produit doit être nettoyé périodiquement en utilisant des matériaux de nettoyage domestiques sanitaires / pour salle de bains. Après le nettoyage, toujours rincer avec de l'eau, puis essuyer avec un chiffon humide pour enlever tous les résidus de produits de nettoyage avant le tarissement. Ne pas utiliser des produits à base d'acides, d'alcalins ou d'autres produits de nettoyage puissants ou concentrés, car ils peuvent décolorer ou endommager le produit. AKW n'approuve et ne recommande pas le nettoyage autoclave en raison des dommages que cela peut causer aux matériaux industriels spéciaux utilisés dans la construction de ce produit.

Désinfection

Lorsqu'il faut désinfecter, les procédures standard pour la désinfection du matériel doivent être utilisées avec soin. Attention aux avertissements concernant les effets néfastes possibles des produits chimiques agressifs sur les barres d'appui.

Conditionnement

Ces barres d'appui sont fournies dans un sac en polypropylène (PP) afin de maintenir la propreté du produit jusqu'à l'installation. Elles peuvent aussi être livrées en vrac dans une boîte en carton. Les deux solutions de conditionnement sont adaptées aux opérations de recyclage. Ces derniers doivent être éliminés conformément aux réglementations locales de recyclage.

Barre d'appui en acier inoxydable poli - Caractéristiques produit

Ce produit est conçu pour une installation unique.

Poids maximal (pression statique)* :

Barre d'appui droite/coudée 150kg

appliqué pendant moins de 30 minutes, toutes les 60 minutes.


* La capacité de poids se réfère uniquement à la barre d'appui.

Les fixations à la surface de montage sont à la charge de l'installateur.

Plage de température standard : +5°C to +35°C.

Matériaux de construction

Support :	SS201
Rosaces :	SS304
Barre :	SS304

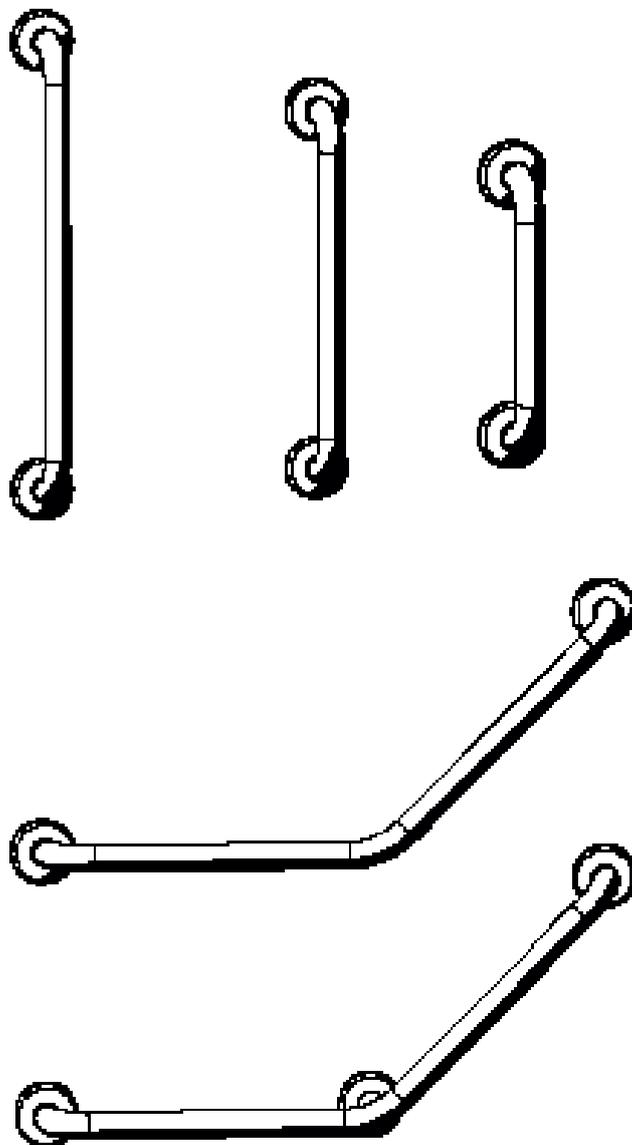

AVIS IMPORTANT DE SECURITE




La charge maximale des barres droites et coudées est évaluée à 150 kg lorsqu'elle est installée et pleinement maintenues conformément à ces instructions.

Si vous n'installez pas ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou si vous procédez à des modifications non autorisées, ceci annule toute garantie et aura une incidence sur la sécurité du produit.


Instructions d'installation

AKW vous recommande de suivre ces instructions lors de l'installation de la barre d'appui. Utilisez des fixations appropriées pour le type de mur. Tous les trous de fixation dans tous les supports de montage doivent être utilisés avec fixation en acier inoxydable de 5 mm ou n° 10. Ne pas trop serrer les fixations et utiliser des fixations appropriées pour la charge. La surface de mur et la structure de support doivent être suffisantes pour soutenir la charge. Tester la surface et les fixations avant utilisation. Un renforcement de brique pleine, bloc de béton ou de bois est essentiel. Chaque fixation doit être capable de supporter 35 kg. Toutes les barres AKW sont conçues et testées pour répondre aux exigences de la norme EN 12182. Choisissez la position avant de commencer de montage.

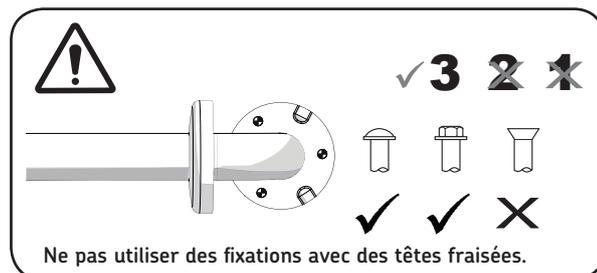


Etape 1

(1) Marquez la position du support de montage sur le mur.

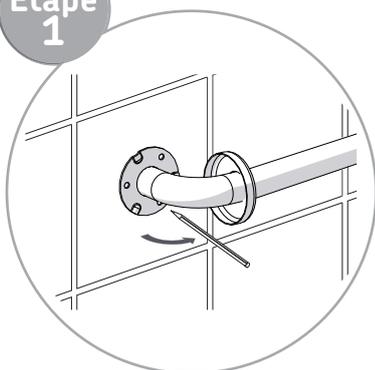


Etape 2

(2) Percez les trous avec une mèche de forage approprié pour mur / carrelage. Utilisez un morceau de ruban adhésif pour marquer le mur et percer, celui-ci protégera le carrelage de l'éclatement.

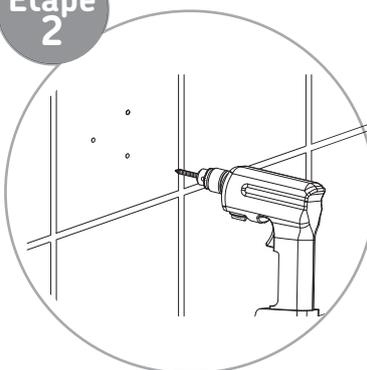


Etape 3

(3) Utilisez des fixations murales adaptées (comme détaillé ci-dessus) pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer les fixations et ne pas utiliser de vis à tête fraisées.

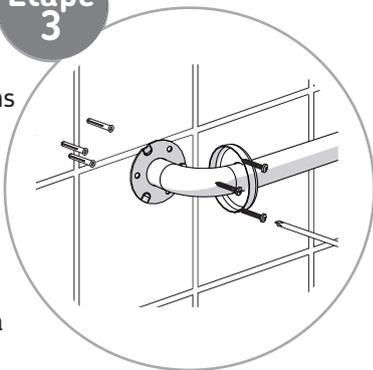

Etape 4

(4) S'assurer que la rosace est en place.

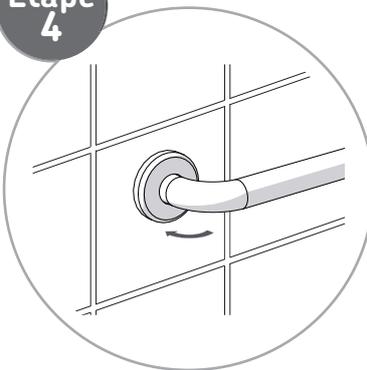

Les barres d'appui en acier inoxydable sont recommandées pour les applications internes. Les barres peuvent être installées dans d'autres endroits, mais la durée de vie du produit ne sera pas atteinte. AKW est incapable de préciser le type de fixation à utiliser simplement à cause du grand nombre de types et de conditions de surfaces possibles.

Informations importantes de sécurité

TOUJOURS fixer cette barre d'appui sur une surface à l'aide de fixations adaptées au type de surface et aux conditions de chargement. TOUJOURS faire correspondre la fixation aux trous dans la barre d'appui. TOUJOURS utiliser tous les trous de fixation. NE JAMAIS installer des fixations à tête fraisée. NE JAMAIS ajouter de fraises aux trous de la barre d'appui. NE JAMAIS élargir les trous de fixation. NE JAMAIS détourner l'utilisation de la barre d'appui - il s'agit d'une aide au déplacement. NE JAMAIS agrandir les trous de fixation. Cela réduira la charge maximale de maintien et annule toute garantie ou capacité de poids indiquée. Les matériaux suivants sont utilisés dans ce produit: Acier inoxydable.

Ces instructions sont fournies pour conseiller les normes minimales d'installation et recommander les meilleures pratiques pour l'installation. En raison de la très grande variabilité des conditions d'installation possibles, AKW ne peut pas fournir toutes les instructions d'installation possibles. AKW n'accepte aucune responsabilité à l'égard de ces informations ou à leur utilisation. Ces informations sont fournies à la condition que la personne qui le reçoit fait ses propres tests pour déterminer les états de charge et d'utilisation. Ne pas installer ce produit AKW conformément aux instructions fournies ou la réalisation de modifications non autorisées annule toute garantie et peut affecter la sécurité du produit. Rien de ce qui précède n'affecte vos droits statutaires.

Téléphone EU : +32 (0) 68 33 48 99 - Téléphone FR : 09 72 29 24 05 - Fax : +32 (0) 68 33 16 58

Email : ism@akw-medicare.com

AKW
life. style. choice.