

Dans le cadre de la gestion du COVID-19 en établissements de santé, cette fiche technique est valable pour le produit conditionné dans l'étui en langue japonaise.
Pour une bonne utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation.

1- Produit

- 1.1- Description** Urinal masculin absorbant jetable à doubles cordonnets coulissants, muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%).
- 1.2- Composition**
- Sac: PEBD, muni de doubles cordonnets (bleu et blanc). Dimensions : 16x38 cm, 40µ.
 - Tampon super-absorbant: Support non-tissé à base de cellulose et de Polymères Super-Absorbants, 24x13cm pour une capacité d'absorption de 450 ml de solution saline 0,9%.


2- Utilisation

- 2.1- Mode d'emploi**
1. Ouvrir la boîte et prendre un sac
 2. Déplier le sac, l'ouvrir, et le tenir avec les mains
 3. Uriner dans le sac
 4. Attendre que le contenu soit transformé en gel.
 5. Pour fermer, tirer les cordonnets de chaque côté du sac, c'est-à-dire bleu sur un côté, blanc de l'autre; nouer.
- 2.2- Élimination** Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.
- 2.3- Précautions d'emploi** Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

3- Réglementaire


- 3.1- Conformité** Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux - Classe I.- CE
- 3.2- Identification** Chaque produit est identifié par un numéro de lot.
- 3.3- Code douanier** 5603149090 (selon la législation européenne en vigueur).
- 3.4- Sécurité** Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions, poids, volume : +/- 5%
- Version 19032020


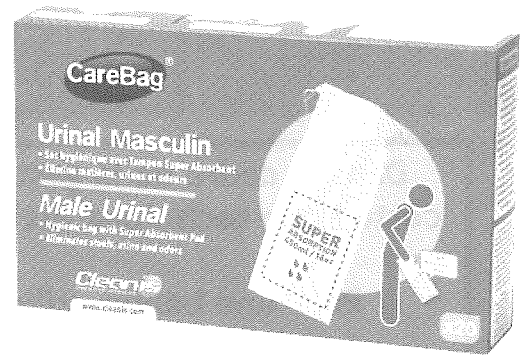


Mode d'emploi


Port de gants recommandé.
Wear appropriate PPE.

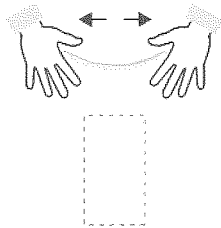

- ① Ouvrir et tenir l'Urinal.
Open and hold the Male Urinal.

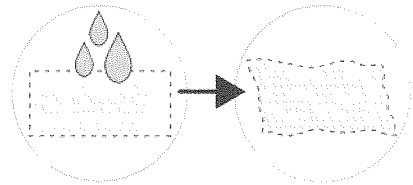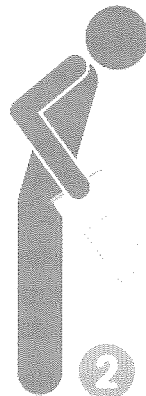

- ② Uriner directement dans le dispositif.
Urinate directly in the device.

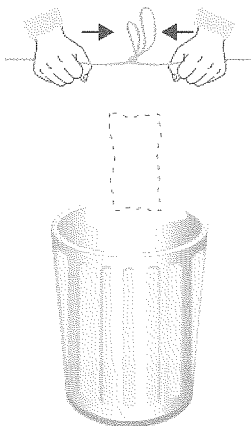

Fermer le dispositif et le jeter à la poubelle
avec les matières solidifiées (jusqu'à 450ml).
NE PAS JETER DANS LES WC.

- ③ Remove the device with the solidified contents
(up to 450ml) and dispose it of in the waste.
DO NOT FLUSH.