

Dans le cadre de la gestion du COVID-19 en établissements de santé, cette fiche technique est valable pour le produit conditionné dans l'étui en langue japonaise. Pour une bonne utilisation, lisez attentivement les instructions d'utilisation.

Ce Protège WC, dont le sac est de plus grande dimension que celui du Protège Bassin, est également utilisable pour un bassin de lit.

1- Produit

1.1- Description

Protège bassin à liens coulissants muni d'un tampon super-absorbant (capacité d'absorption de 450 ml saline 0,9%, équivalence fluides biologiques).

1.2- Composition

- **Sac** : PEBD, muni de liens coulissants PEHD bleus. Dimensions : 65x38 cm, 37µ.
- **Tampon super-absorbant** : Support non-tissé à base de cellulose et de Polymères Super-Absorbants, 24x13cm.

2- Utilisation

2.1- Mode d'emploi

1. Ouvrir la boîte et enlever le rouleau de protèges-bassin.
2. Dérouler le 1^{er} protège-bassin et tirer en séparant le long des marques de perforation.
3. Ouvrir le sac et le positionner sur le bassin.
4. Le tampon doit être au fond du protège-bassin.
5. Utiliser le bassin garni du protège-bassin.
6. Attendre que le contenu (+/-450 ml max) soit transformé en gel.
7. Fermer le sac avec un nœud.

2.2- Élimination

Déchets ménagers ou DASRI si indiqué. Ce produit est conforme à la législation en termes de risque de pollution après incinération et ne rejette aucun dérivé chloré propre à la formation de dioxine.

2.3- Précautions d'emploi

Produit à usage unique. Ne pas réutiliser après emploi. En cas de contact oculaire rincer abondamment l'oeil et contacter un médecin si nécessaire. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage. Ne pas laisser à portée des enfants.

3- Réglementaire

3.1- Conformité

Conforme à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux -Classe I-CE.

3.1- Identification

Chaque produit est identifié par un numéro de lot.

3.2- Code douanier

5603149090 (selon la législation européenne en vigueur).

3.3- Sécurité


Ce produit n'est pas dangereux selon les critères de l'Union Européenne. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

- Brevets, marques, dessins et modèles internationaux déposés
- Dimensions, poids, volume : +/- 5%
- Version 19032020




Mode d'emploi

Port de gants recommandé
Wear appropriate PPE.

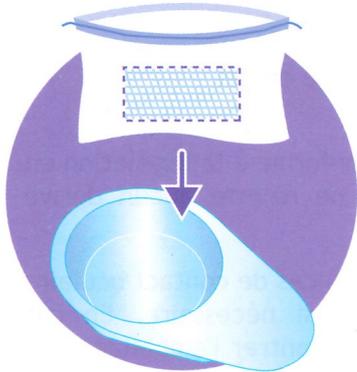

1

Placer un Protège Bassin sur le bassin.
Place the Bedpan Liner over the bedpan.

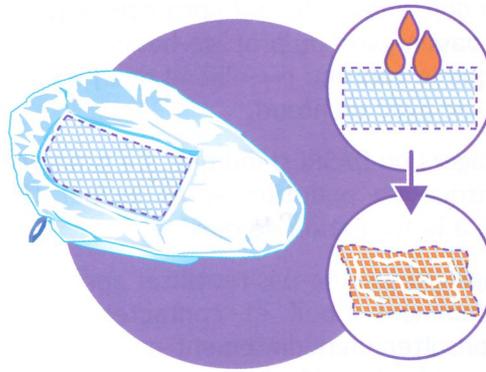

2

Le bassin est prêt à l'usage.
The bedpan is ready to use.



3

Retirer le Protège Bassin avec les matières et urines solidifiées (jusqu'à 450ml), fermer, jeter à la poubelle (comme les couches et changes). NE PAS JETER DANS LES WC.
Remove the device with the solidified waste (up to 450ml), close and dispose of properly (like diapers). **DO NOT FLUSH.**