

**SANYRENE
(Corpitolinol 60)****SOIN ET PREVENTION DES ROUGEURS CUTANÉES D'APPUI**

□ DESCRIPTION :

- 99 % de glycérides hyperoxygénés d'acides gras essentiels (acide linoléïque (60 %) ou Corpitolinol 60, tocophérols (vitamine E)).
- 1 % de parfum anis.

□ PROPRIÉTÉS :

- Restauration du film lipidique.
- Amélioration de la cohésion cellulaire épidermique.
- Augmentation du renouvellement cellulaire.
- Maintien du niveau d'oxygénation tissulaire à l'appui (mesurée par TcPO₂ chez l'homme).

□ INDICATIONS :

- Zones d'appui à risque d'escarre.
- Rougeur d'appui résolutive.

□ MODE D'EMPLOI :**• SANYRENE flacon**

- Appliquer SANYRENE sur la zone d'appui, à raison de 1 à 2 pulvérisations selon l'étendue de la localisation (talon, région sacro-ischiatique).
- Faire pénétrer par effleurement du bout des doigts pendant une minute.
- Renouveler l'opération 3 à 4 fois par 24 h, à chaque changement positionnel.

□ PRESENTATION :

CODES	PRESENTATIONS	QUANTITE MINIMUM LIVRABLE	GROUPAGES
--------------	----------------------	--------------------------------------	------------------

FLACON POMPE DOSEUSE CONDITIONNE INDIVIDUELLEMENT EN BOITE

2574	Flacon 20 ml	10 flacons	100 flacons
2612	Flacon 10 ml	12 flacons	180 flacons
4539	Flacon 50 ml	10 flacons	60 flacons

□ SPECIFICATIONS :

NATURE DES CONTROLES	SPECIFICATIONS
Caractères	Huile légèrement visqueuse de couleur ambrée présentant une odeur caractéristique d'anis
Indice Peroxyde : Indice d'Acide :	50 à 150 mEq/Kg ≤ 1.0
Péremption :	3 ans

□ STATUT REGLEMENTAIRE :

Dispositif médical marqué CE.

*SANYRENE a été conçu et est fabriqué par les :
Laboratoires URGO - 21300 CHENOVE - FRANCE*