




Recommandations d'utilisation

1. DESINFECTION



Désinfecter le septum avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique (protocole de l'établissement) **avant**¹ chaque utilisation. Laisser sécher.

2. CONNEXION & ADMINISTRATION

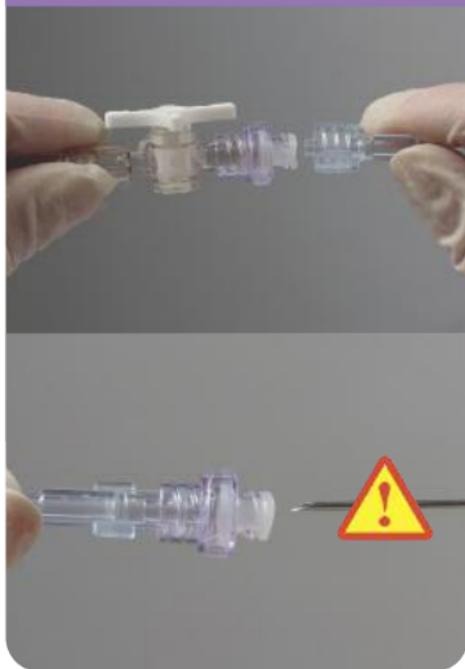

Connecter l'embout Luer mâle, enfoncer de façon rectiligne et tourner.

NB : En cas de connexion Luer simple ou avec un système de prélèvement, enfoncer puis faire ¼ de tour.

Accès strictement sans aiguille.

3. DECONNEXION



Impérativement clamer (ou fermer le robinet) avant de déconnecter le Luer (pression négative) afin d'éviter le reflux sanguin.

4. RINÇAGE



Il est recommandé de rincer la valve après chaque utilisation, avec du NaCl 0,9%.

Si vous utilisez une seringue pré-remplie BD PosiFlush™ SP, débloquent le témoin de stérilité en poussant sur le piston.

Dévisser le bouchon et purger.

Connecter la seringue de NaCl 0,9%.

Ouvrir le robinet, ou déclamer.

Réaliser un rinçage pulsé.

Fermer le robinet, ou clamer.

Déconnecter, puis éliminer la seringue.

5. DESINFECTION



Désinfecter le septum avec une compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique (protocole de l'établissement) **après** chaque utilisation.

BD Q-Syte™ - Informations produit

| Réf. | Débit maximal | Volume mort | Nombre maximal d'activations* |
|--------|---------------|-------------|-------------------------------|
| 385100 | 525 mL/mn | 0,16 mL | 100 |

*1 activation = 1 connexion + 1 déconnexion

1. SF2H. Surveiller et prévenir les infections associées aux soins. R114, 2010.

ABV223 - © 2016 BD - BD, le Logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. 04/16 - AB•Com