

REVITIVE AEROSURE

Dispositif médical d'aide respiratoire de classe I

Pour les personnes souffrant de troubles respiratoires comme la BPCO (Bronchopneumopathie Chronique Obstructive) dont 80% des cas sont attribuables au tabagisme, des symptômes comme l'essoufflement ou une toux persistante peuvent gravement impacter leur qualité de vie.

Avec le dispositif Aerosure®, la marque Revitive®, porteuse d'innovation et No.1 des ventes de stimulateurs circulatoires en France, offre une solution efficace, prouvée cliniquement et sans médicament.

Revitive Aerosure est une aide respiratoire qui a prouvé lors d'un récent test clinique qu'elle peut contribuer à réduire l'essoufflement et la toux chez les personnes souffrant d'une BPCO. Des bénéfices majeurs permettant d'améliorer significativement leur qualité de vie.

L'utilisation de Revitive Aerosure est conçue pour :

- ▶ **Améliorer la toux chronique**
- ▶ **Améliorer l'essoufflement**
- ▶ **Réduire la sensation d'oppression sur la poitrine, associée à l'essoufflement**
- ▶ **Renforcer les muscles respiratoires**

Convient aussi en cas de Bronchectasie, Fibrose Kystique et Asthme

Revitive Aerosure est le seul appareil sur le marché à offrir 2 modes d'action pour permettre l'entraînement des muscles respiratoires par la thérapie de vibration.

- ⌚ Mode Respiration Facilitée
- ⬆️ Mode Évacuation du Mucus

Ce même principe d'entraînement respiratoire est utilisé par les kinésithérapeutes et les cliniques de réhabilitation. Revitive Aerosure offre la solution à domicile, facile d'utilisation, portable et accessible.



Référence: 4415-3481AJ

	Code EAN	Dimensions	Poids Brut (kg)
Unité	1	195 (H) x 100 (L) x 158 (P) mm	0,67
Carton	10	210 (H) x 400 (L) x 525 (P) mm	8,00
Palette	280	1580 (H) x 1200 (L) x 800 (P) mm	238,00

Caractéristiques principales



Sans médicament

Revitive Aerosure ne remplace pas un médicament, mais offre une aide sans médicament pour améliorer la qualité de vie chez les personnes atteintes d'un trouble respiratoire. Ceci permet aux utilisateurs d'éviter des conflits médicamenteux.



Mode Respiration Facilitée

La résistance provoque une augmentation de la pression dans les poumons et cible les muscles du système respiratoire. Elle contribue à maintenir les voies respiratoires ouvertes et incite les muscles à travailler plus fort, ce qui entraîne une diminution de l'essoufflement.



Mode Évacuation du Mucus

Des vibrations transmises à la paroi thoracique contribuent à déloger le mucus des voies respiratoires et des poumons.



Rechargeable

Avec son socle de recharge, l'appareil est facile et pratique à utiliser.

Inclus: Appareil rechargeable Revitive Aerosure, tête remplaçable Revitive Aerosure, socle de charge et cordon d'alimentation, manuel de l'utilisateur, étui de rangement réutilisable

DISPOSITIF MÉDICAL | CLINIQUEMENT PROUVÉ | SANS MÉDICAMENT

REVITIVE

N'utilisez pas Revitive Aerosure si vous souffrez ou avez souffert des pathologies suivantes :

- Épilepsie
- Épisode actuel ou passé de pneumothorax (affaissement du poumon)
- Instabilité hémodynamique, y compris une grave insuffisance cardiaque droite accompagnée d'hypotension (pression artérielle anormalement élevée ou faible, rythme cardiaque très lent ou très rapide)
- Embolie pulmonaire actuelle (présence d'un caillot de sang dans les vaisseaux sanguins des poumons)
- Varices œsophagiennes (dilatation des veines dans la paroi de l'œsophage)
- Épisode récent de traumatisme ou de chirurgie thoracique ou du tractus gastro-intestinal supérieur, jusqu'à la guérison ou cicatrisation complète (thorax, duodénum, estomac ou œsophage)
- Épisode récent de traumatisme ou de chirurgie dentaire, de la tête, du cou, des oreilles, du nez et de la gorge, jusqu'à la guérison ou cicatrisation complète
- Côte cassée jusqu'à la guérison ou cicatrisation complète
- Sinusite aiguë ou saignement de nez
- Hémoptysie active (rejet de sang lors de la toux)
- Pression intracrânienne accrue (pression anormalement élevée à l'intérieur du crâne et du cerveau)
- Grossesse

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation d'Revitive Aerosure dans votre cas ou quant à la cause de vos symptômes, vous devriez prendre conseil auprès de votre professionnel de santé avant d'utiliser l'appareil.

Accessoires Revitive Aerosure

Tête de rechange

Référence: 3466-3483AL

		Code EAN	Dimensions	Poids Brut (kg)
Unité	1	5060217494035	50 (H) x 81 (L) x 163 (P) mm	0,08
Carton	50	5060217494042	300 (H) x 260 (L) x 420 (P) mm	5,00

Il est recommandé de changer la tête tous les 6 mois

Inclus: une tête de rechange à utiliser avec l'appareil Revitive Aerosure



Tous les mois, Revitive est publicisé autour des programmes favoris des seniors.



Pour toute commande, veuillez contacter notre service Logistique à l'adresse e-mail suivante: logistique@revitive.fr

Pour toute demande SAV, veuillez contacter notre service à l'adresse suivant: contact@revitive.fr

Toute commande est soumise à nos conditions générales de vente (CGV) et emporte leur acceptation sans réserve.

Conformément aux clauses plus amplement détaillées dans nos CGV jointes au présent tarif :

- TOUT LITIGE EN RELATION AVEC UNE COMMANDE OU CONTRAT SERA SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE PARIS.
- NOUS CONSERVONS LA PROPRIETE DES PRODUITS JUSQU'AU COMPLET PAIEMENT DU PRIX.