

ACCROCHE-CANNE

Référence	Désignation
CT03ACC03	Accroche-canne



Atouts :

- Equipé d'un système antidérapant.
- Bloque la canne en position verticale sur une table ou sur une étagère.
- Plus besoin de se baisser pour la ramasser.

Mode d'emploi :

- Pour placer l'accroche-canne sur la canne de marche, écarter le support et insérer la canne.
- L'accroche-canne doit être placé vers le haut de la canne de marche pour une bonne utilisation, sans gêner l'utilisateur.
- L'accroche-canne avec la canne peuvent être posés sur une table ou un meuble. La canne est maintenue par le support.
- Pour une utilisation optimale, le meuble doit être haut et la canne ne doit pas toucher le sol.

Description :

- Dimensions : 5,3 x 4,5 x 2,3 cm
- Poids net : 18 g

Composition :

- ABS
- Mousse antidérapante

Précautions d'emploi :

- Tenir hors de portée des enfants.
- PharmaOuest Industries ne peut être tenu responsable de tous dommages liés à une utilisation non conforme du produit.

Conditionnement :

- A l'unité, sous boîte carton, encombrement : 5 x 5 x 5 cm.
- Poids brut : 25 g.